

Artikel:	<b>Multi-Gerätehalterung RD + FT</b>
Artikel-Nr:	<b>12315 + 12832</b>
	Geräte-Positionierung und Gurt-Positionen für <b>Philips trilogy 100</b>

**Finale Position** des Gerätes **Philips trilogy 100**



Benötigt werden:




- 2 x schwarzes Gurtstück mit Steckern
- 2 x schwarzes Gurtstück mit Kupplung
- 2 x rotes Gurtstück mit Stecker
- 2 x rotes Gurtstück mit Kupplung

Stand:	2.04.2015	Seite 1 von 3	Version: 01	MM-MH-12315-A07-01
--------	-----------	---------------	-------------	--------------------


**Positionierung und Gurtpositionen für Philips trilogy 100**

**Rückwand linke Seite**

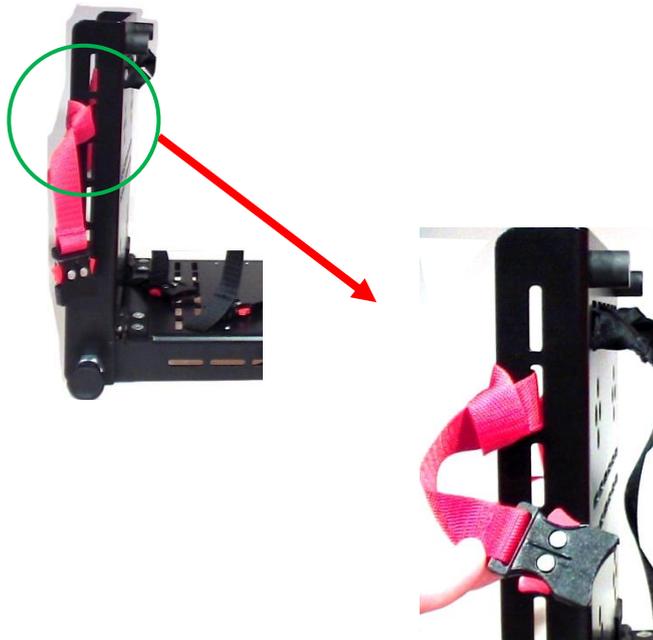

roter Gurt mit Kupplung:  
4. Loch oberhalb des Rastbolzens

**Rückwand rechte Seite**

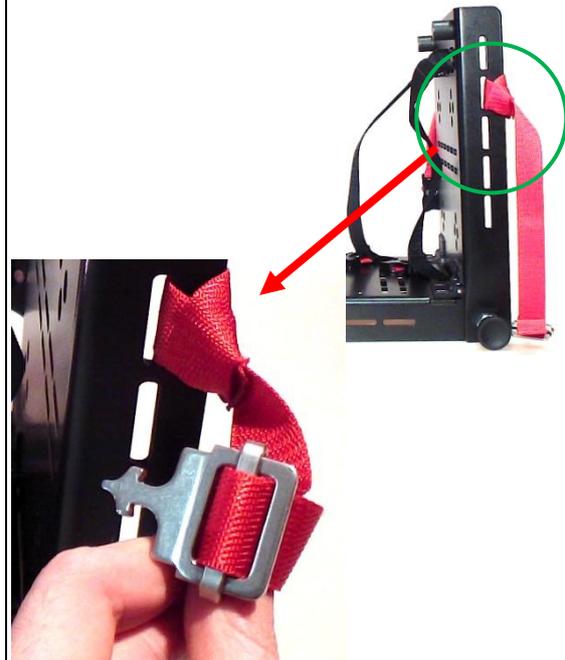


roter Gurt mit Stecker:  
4. Loch oberhalb des Rastbolzens

**Bodenplatte (mittlere / vordere Reihe)**



- A. schwarzer Gurt mit Stecker: 1. Loch rechts
- B. roter Gurt mit Kupplung: 1. Loch rechts
- C. roter Gurt mit Stecker: 1. Loch links
- D. schwarzer Gurt mit Stecker: 1. Loch links

**Rückwand (obere Reihe)**

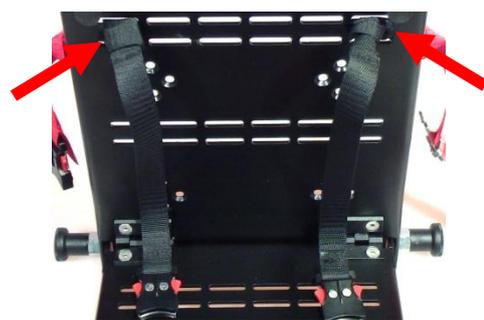

- schwarzer Gurt mit Kupplung:  
1. Loch von links
- schwarzer Gurt mit Kupplung:  
1. Loch von rechts

**Gesamtansicht Gurte**



**Gesamtansicht Gurte + Gerät**



**Aufstellposition/Anschlüsse**



- Anschlüsse des **trilogy 100** müssen immer frei bleiben (rote Markierungen)
- Gurtschloss wie im Bild platzieren

**Aufstellposition/ Anschlüsse**



- Das Gerät mit oberkante an die Rückwand anstellen. Vorne und Hinten verbleibt ein Freiraum (siehe rote Markierung).
- Nach Positionierung des Gerätes alle Gurte schliessen und fest anziehen.

**Aufstellposition/ Anschlüsse**



- Die zwei schwarzen Gurte mit Stecker unter dem Gerät an die Vorderkante führen (siehe Pfeile).
- Die Gurtverschlüsse vorne dürfen nicht auf der Geräteoberseite liegen.