

Artikel:	Multi-Gerätehalterung RD
Artikel-Nr:	12315
	Geräte-Positionierung und Gurt-Positionen für Welch Allyn Propaq® CS Monitor

Finale Position des Geräts **Propaq® CS Monitor mit Druckmodol**



Benötigt werden:



- 2 x schwarzes Gurtstück mit Kupplung
- 2 x schwarzes Gurtstück mit Steckern
- 1 x rotes Gurtstück mit Kupplung
- 1 x rotes Gurtstück mit Stecker
- 1 x roter Verlängerungsgurt mit Kupplung + Stecker

Stand:	02.12.2014	Seite 1 von 4	Version: 01	MM-MH-12315-A06-01
--------	------------	---------------	-------------	--------------------

Positionierung und Gurtpositionen für Propaq CS


Linke Geräte-Seite



Roter Gurt mit Kupplung:
in das mittlere Loch
an der Bodenseite

Schwarzer Gurt mit Kupplung:
2. Loch oberhalb des Rastbolzens


Rechte Geräte-Seite

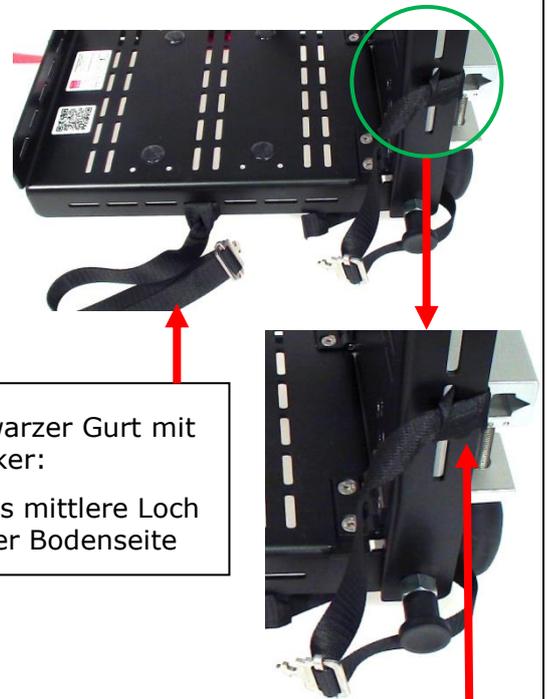

Schwarzer Gurt mit Stecker:
in das mittlere Loch
an der Bodenseite

Schwarzer Gurt mit Stecker:
2. Loch oberhalb des Rastbolzens

Rückenwand

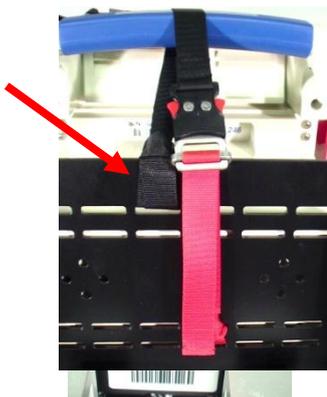

Schwarzer Gurt mit Kupplung:
3. Loch von links in der oberen Reihe.

Hinweis: nur das obere Loch nutzen und den Gurt um die Gehäusekante schlaufen.

Rückenwand



Roter Gurt mit Stecker:
4. Loch von links in der unteren Reihe der Rückenwand


Gesamtansicht Gurte



Gesamtansicht Gurte + Gerät



Aufstellposition/Anschlüsse

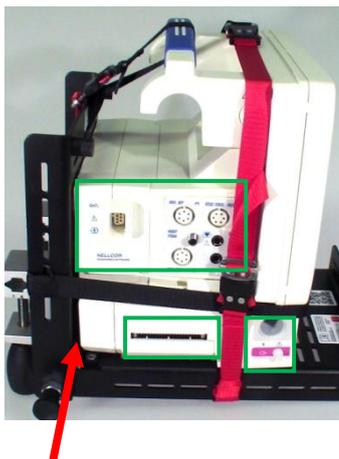


- Der Monitor muss komplett auf der Bodenplatte bündig an die Rückwand angestellt werden.
- Anschlüsse des Propaq® CS Monitor müssen immer frei bleiben (siehe grüne Markierungen)

Gurt umlaufend unten



- Den schwarzen Gurt unterhalb des Displays zusammen stecken und **festziehen**
- Gurtschloss auf der Vorderseite links (siehe Pfeil)

Gurt umlaufend oben

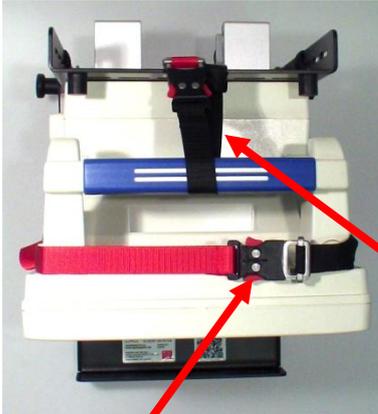

- Der rote Verlängerungsgurt verbindet oben die beiden geschlaufenen Gurte der rechten und linken Seite
- Die Gurtschnalle ist hierbei oben rechts.
- Nach Positionierung **fest** anziehen.

Gurt um den Griff



- Die beide Gurte an der Rückenwand müssen um den blauen Handgriff herum geführt, geschlossen und **festgezogen** werden