

Artikel:	Multi-Gerätehalterung RD
Artikel-Nr:	12315
	Geräte-Positionierung und Gurt-Positionen für RESMED Elisée 150

Finale Position des Geräts **Elisée 150**




Benötigt werden:



- 2 x schwarzes Gurtstück mit Stecker
- 2 x schwarzes Gurtstück mit Kupplung
- 1 x rotes Gurtstück mit Kupplung
- 1 x rotes Gurtstück mit Stecker


Positionierung und Gurtpositionen für **Elisée 150**

Linke Geräte-Seite

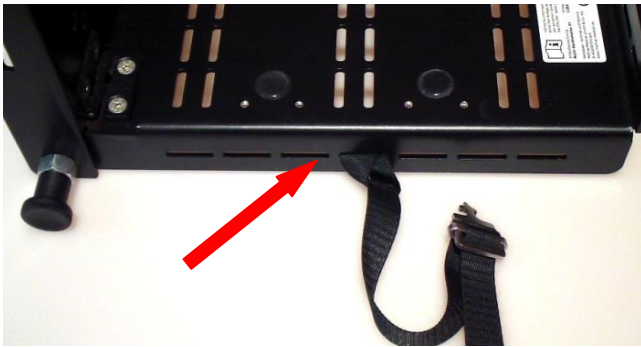

Schwarzer Gurt mit Stecker, in das mittlere Loch

Rechte Geräte-Seite

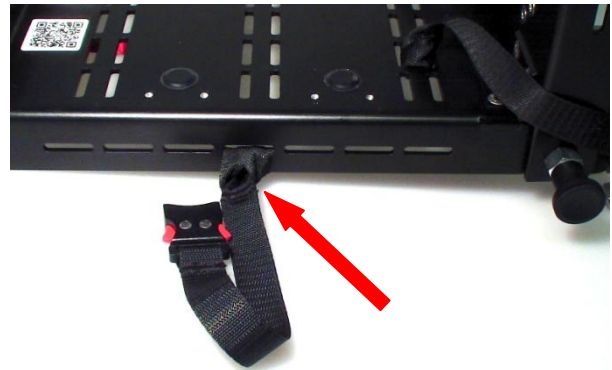


Schwarzer Gurt mit Kupplung, in das mittlere Loch

Bodenplatte hinten




Schwarzer Gurt mit Kupplung: 2. Loch von links
Schwarzer Gurt mit Stecker: 2. Loch von rechts

Bodenplatte vorne

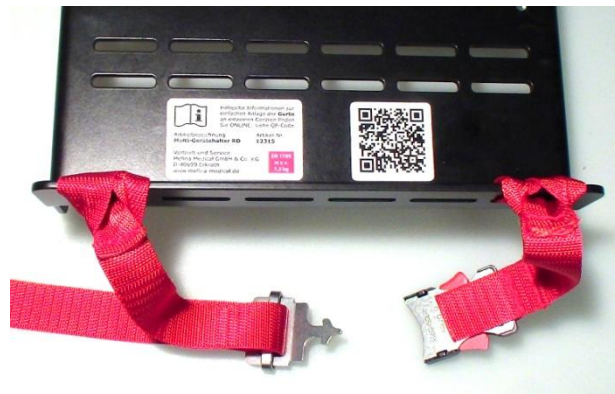

Roter Gurt mit Stecker: 1. Loch von links
Roter Gurt mit Kupplung: 1. Loch rechts


Gesamtansicht Gurt

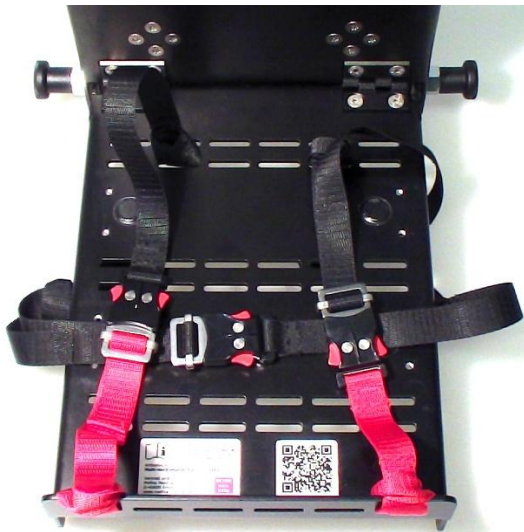

Gesamtansicht Gurte + Gerät



Genauere Aufstellposition

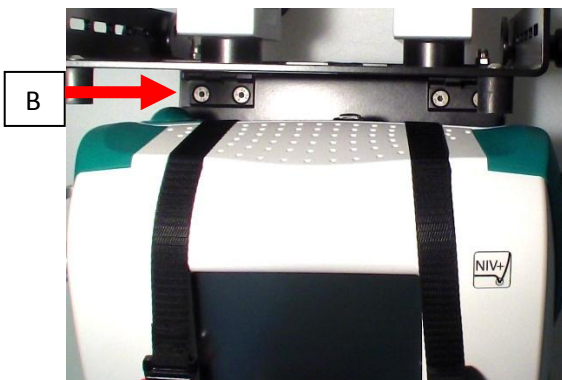

- **Genauere Position vorne:** bündig an der Vorderkante anstehend (A)
- **Genauere Position hinten:** mit Spalt zwischen Gerät und Rückwand! (B)
- **Reihenfolge:** erste das Gurtpaar von rechts nach links verschleifen, dann darüber liegend die Gurte von hinten nach vorne.