

Artikel:	Multi-Gerätehalterung RD
Artikel-Nr:	12315
	Geräte-Positionierung und Gurt-Positionen für ResMed VS III

Finale Position des Geräts **ResMed VS III**




Benötigt werden:



- 2 x schwarzes Gurtstück mit Steckern
- 2 x schwarzes Gurtstück mit Kupplung
- 2 x rotes Gurtstück mit Stecker
- 2 x rotes Gurtstück mit Kupplung


Positionierung und Gurtpositionen für ResMed VS III

linke Geräteseite

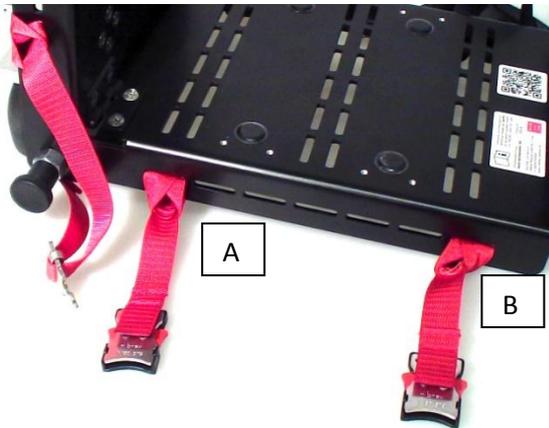

- A) Roter Gurt mit Kupplung:
1. Loch nach dem Rastbolzen
- B) Roter Gurt mit Kupplung:
7. Loch nach dem Rastbolzen

rechte Geräteseite

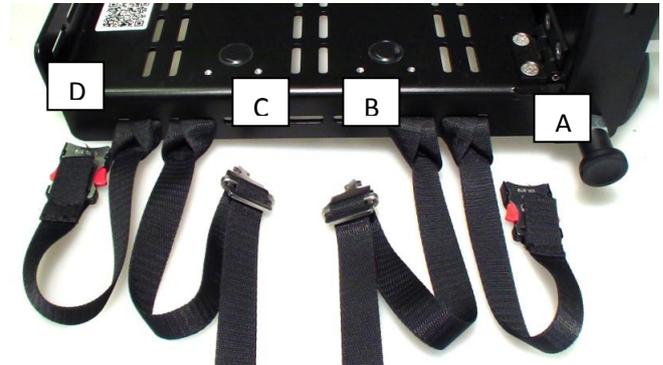

- A) Schwarzer Gurt mit Kupplung:
1. Loch nach dem Rastbolzen
- B) Schwarzer Gurt mit Stecker:
2. Loch nach dem Rastbolzen
- C) Schwarzer Gurt mit Stecker:
6. Loch nach dem Rastbolzen
- D) Schwarzer Gurt mit Kupplung:
7. Loch nach dem Rastbolzen

Bodenplatte vorne



- Roter Gurt mit Stecker:
1. Loch von Links

Rückwand linke Seite



- Roter Gurt mit Stecker :
1. Loch oberhalb des Rastbolzens

Gesamtansicht Gurte



Gesamtansicht Gurte + Gerät



A) alle 4 Gurte müssen durch die Handgriffe geführt werden, geschlossen und Richtung Bodenplatte **festgezogen** werden.



Anschlüsse des **ResMed VS III** müssen immer freibleiben (siehe rote Markierungen)

Genauere Aufstellposition

- Das Gerät bündig an die Rückwand anstellen. Vorne zur Kante verbleibt ein Freiraum (B)
- Die vier Gurtverschlüsse dürfen nicht auf der Geräteoberseite liegen. Position siehe Foto.

