

Artikel:	Multi-Gerätehalterung RD
Artikel-Nr:	12315
	Geräte-Positionierung und Gurt-Positionen für BREAS Vivo 50 und Vivo 60

Finale Position des Geräts **BREAS Vivo 50**



Benötigt werden:



- 2 x schwarzes Gurtstück mit Steckern
- 2 x schwarzes Gurtstück mit Kupplung
- 2 x rotes Gurtstück mit Stecker
- 2 x rotes Gurtstück mit Kupplung

Positionierung und Gurtpositionen für BREAS Vivo 50

Bodenplatte vorne




Zwei rote Gurte mit Kupplung:
 1. Loch von rechts
 4. Loch von rechts

Linke Geräte-Seite



Roter Gurt mit Stecker:
 in das mittlere Loch an der Bodenseite
 Schwarzer Gurt mit Stecker:
 3. Loch an der Bodenseite

Rückenwand (untere reihe)

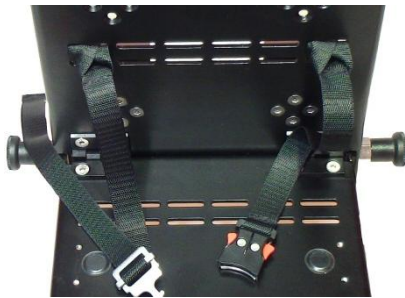

Schwarzer Gurt mit Stecker: 1. Loch von Links
 Schwarzer Gurt mit Kupplung: 1. Loch von rechts

Gesamtansicht Gurte



Rechte Geräte-Seite



Schlaufen-Technik

Roter Gurt mit Stecker über schwarzen
 Gurt mit Kupplung führen (siehe Bilder)

Schwarzer Gurt mit Kupplung:
 3. Loch nach dem Rastbolzen

Aufstellposition / Linke Seite



Das Gerät mit der kante an die Rückwand anstellen (rote Pfeil)
 Patientenluftereinlass muss frei bleiben (rote Markierung)

Gesamtansicht Gurte



Aufstellposition / Anschlüsse



- Gurtschlösser wie im Bild platzieren
- Display und Bedientasten müssen freibleiben

Aufstellposition / Rechte Seite



Alle Anschlüsse des Gerät Vivo 50 auf der rechten Seite müssen immer freibleiben (siehe Bild)