


Artikel:	<b>Multi-Gerätehalterung RD</b>
Artikel-Nr:	<b>12315</b>
	Geräte-Positionierung und Gurt-Positionen für <b>Covidien Puritan Bennett Ventilator Typ 560 und 520</b>

**Finale Position** des Geräts **Covidien Puritan Bennett Ventilator 560**



Benötigt werden:

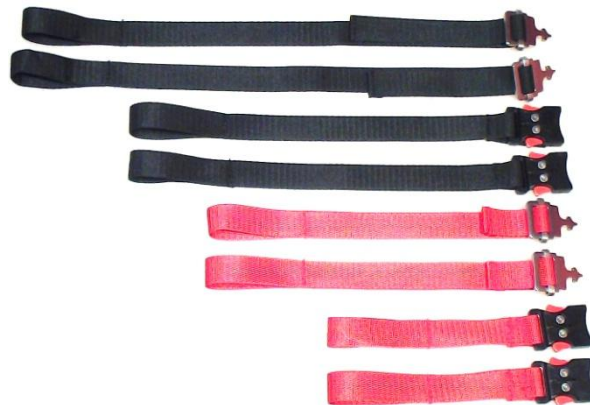


- 2 x schwarzes Gurtstück mit Steckern
- 2 x schwarzes Gurtstück mit Kupplung
- 2 x rotes Gurtstück mit Stecker
- 2 x rotes Gurtstück mit Kupplung

**linke Geräteseite**



roter Gurt mit Stecker:  
 2. Loch vor dem Rastbolzen

**rechte Geräteseite**

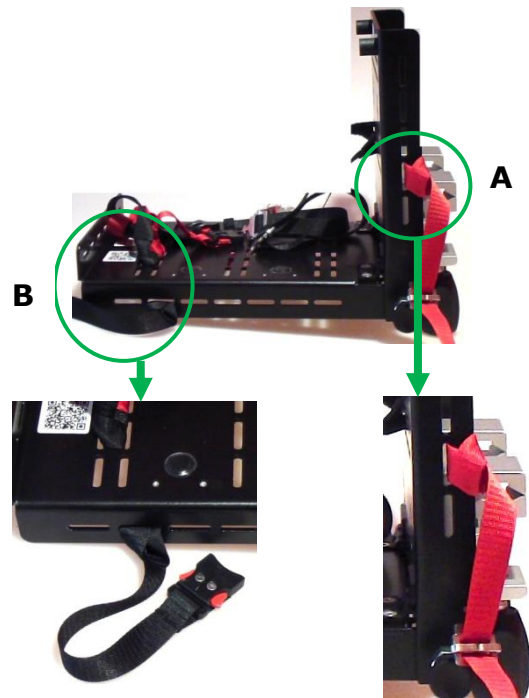

**A.** roter Gurt mit Stecker:  
 2. Loch oberhalb des Rastbolzens


**B.** schwarzer Gurt mit Kupplung:  
 6. Loch nach dem Rastbolzen

**Bodenplatte (vordere Reihe)**



roten Gurt mit Kupplung über schwarzen Gurt mit  
 Kupplung führen (siehe Bild)


**Bodenplatte (vordere Reihe)**

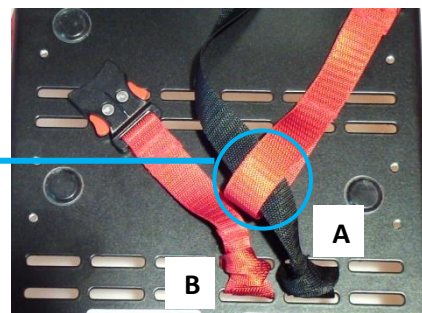

**A.** schwarzer Gurt mit Kupplung:  
 2. Loch von rechts

**B.** roter Gurt mit Kupplung:  
 3. Loch von rechts

### Rückwand (untere Reihe)

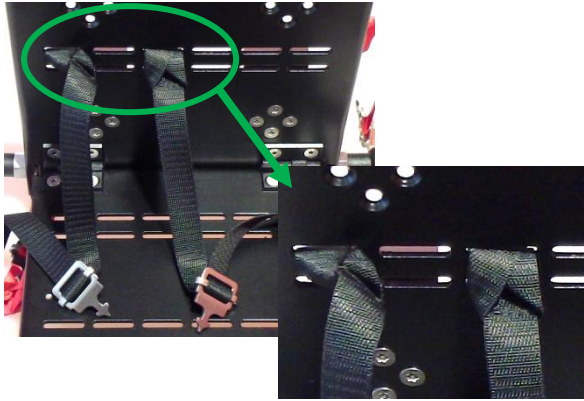

- schwarzer Gurt mit Stecker:
1. Loch von links
- schwarzer Gurt mit Stecker:
3. Loch von links

### Gesamtansicht Gurte



### Aufstellposition/Anschlüsse



- Das Gerät muss auf der Bodenplatte bündig an die Rückwand angestellt werden. Vorne bleibt etwas Freiraum.
- Anschlüsse müssen immer frei bleiben (siehe Bild)

### Gesamtansicht Gurte + Gerät




**Aufstellposition/Anschlüsse**




Gurtverschluss wie im Bild platzieren

**Aufstellposition/Anschlüsse**

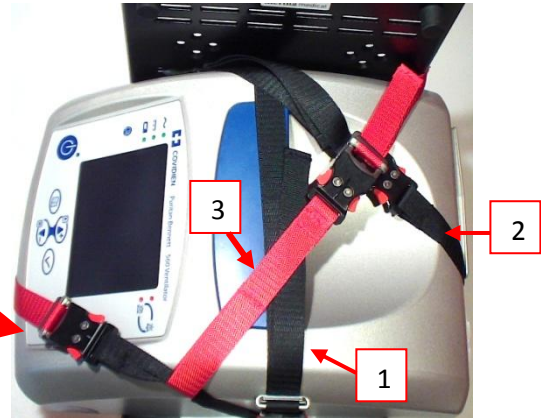

Beachten Sie die Reihenfolge beim Schließen der Gurtpaare (siehe Bild)

**Aufstellposition/Anschlüsse**

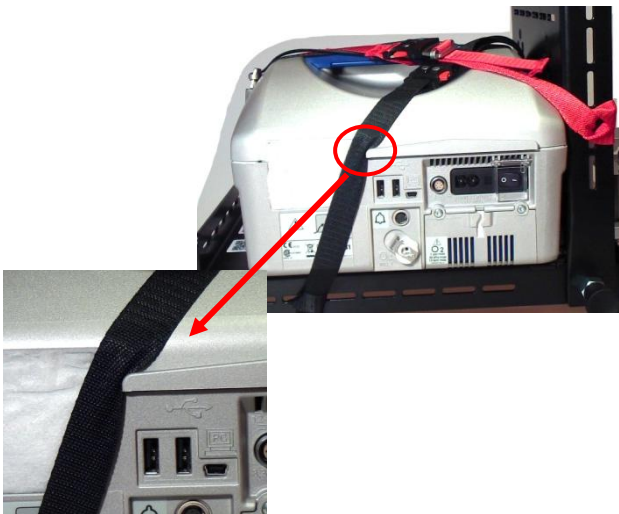

schwarzen Gurt an der rechten Seite (Geräterückseite) wie im Bild aufstellen

**Aufstellposition/Anschlüsse**



Gurtschloss darf nicht auf der Gerätekante platziert werden (siehe Bild)

Nach Positionierung des Gerätes alle Gurte schließen und fest anziehen.