

Artikel:	Multi-Gerätehalterung RD
Artikel-Nr:	12315
	Geräte-Positionierung und Gurt-Positionen für myAIRVO2

Finale Position des Geräts **myAIRVO2**




Benötigt werden:



- 1 x schwarzes Gurtstück mit Stecker
- 1 x schwarzes Gurtstück mit Kupplung
- 2 x rote Gurtstücke mit Stecker
- 2 x rote Gurtstücke mit Kupplung


Positionierung und Gurtpositionen für **myAIRVO2**

Linke Geräteseite

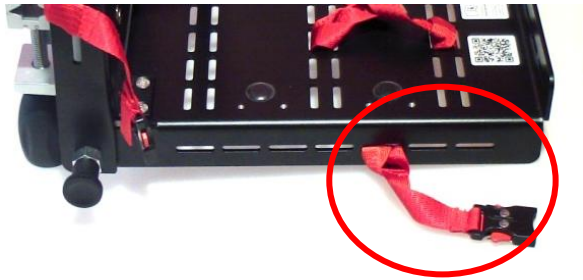


roter Gurt mit Kupplung
3. Loch von rechts

Rückwand (Mitte)

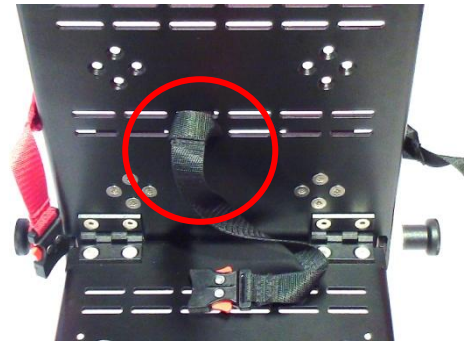


schwarzer Gurt mit Kupplung
3. Loch von links

Rückwand (rechte Seite)

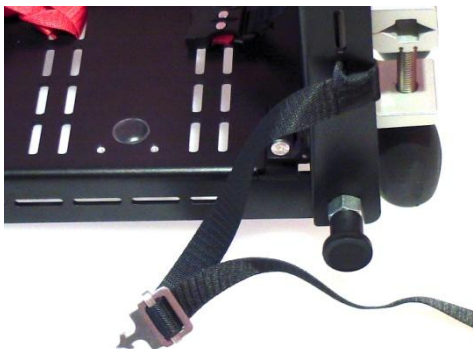

schwarzer Gurt mit Stecker:
1. Loch oberhalb des Rastbolzens

Rückwand (linke Seite)

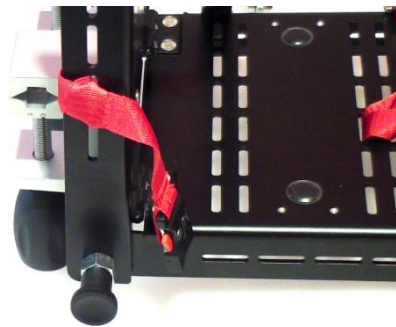


roter Gurt mit Kupplung:
2. Loch oberhalb des Rastbolzens

Positionierung und Gurtpositionen für myAIRVO2

Gesamtansicht Gurte




Bodenplatte

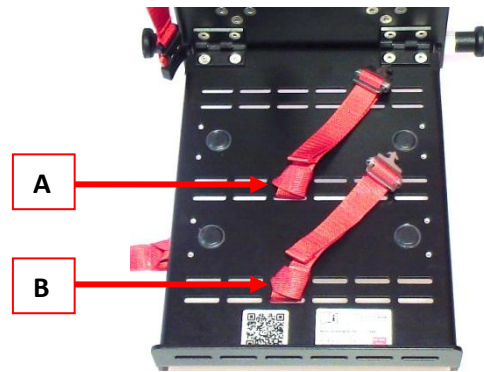

A. roter Gurt mit Stecker
3. Loch von links

B. roter Gurt mit Stecker
3. Loch von links


Genauere Aufstellposition

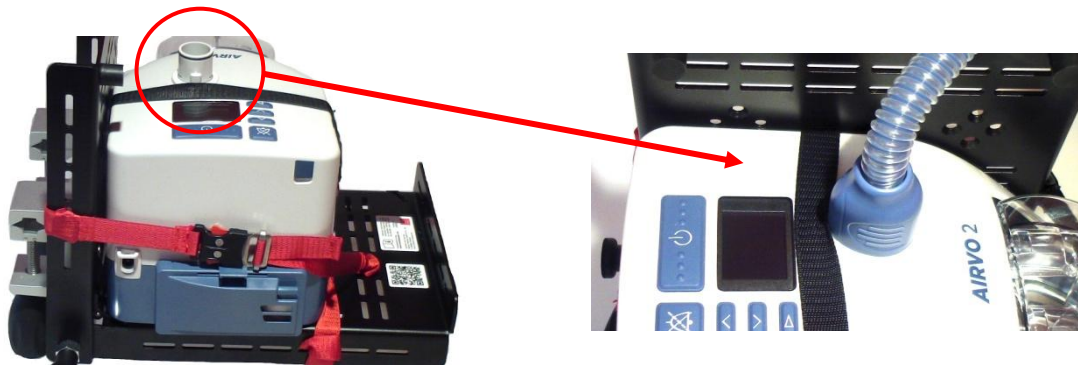

- Das Gerät muss auf der Bodenplatte bündig gegen die Rückwand angestellt werden. Vor dem Gerät bleibt freier Raum übrig.
- Anschlüsse, Tasten und Display müssen immer frei bleiben. (siehe Bilder)


Positionierung und Gurtpositionen für **myAIRVO2**

Gurtverschlüsse

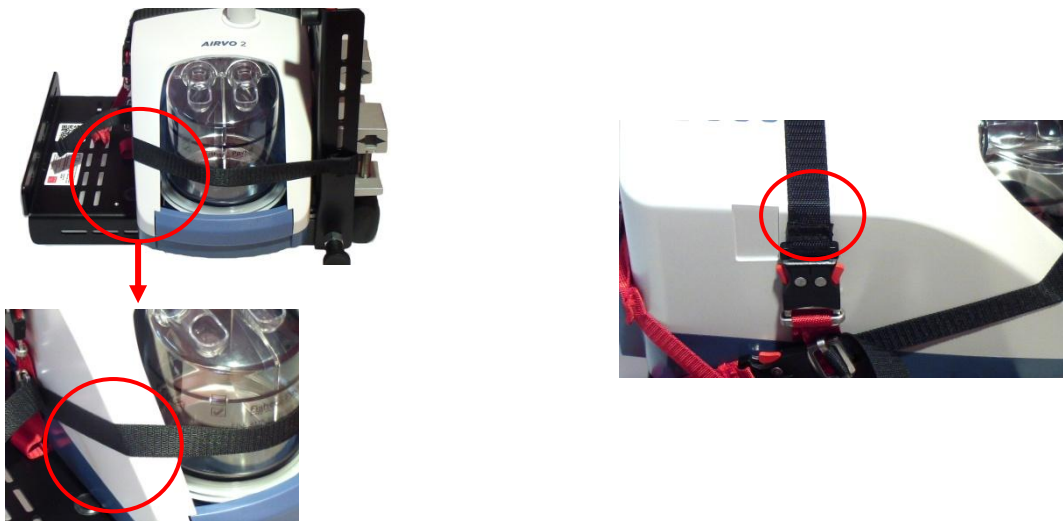

- Gurtverschlüsse gemäß Bildern platzieren. (nur der Gurt geht über die kanten des Gerätes, nicht das Gurtschloß selbst)

Gurtverschlüsse

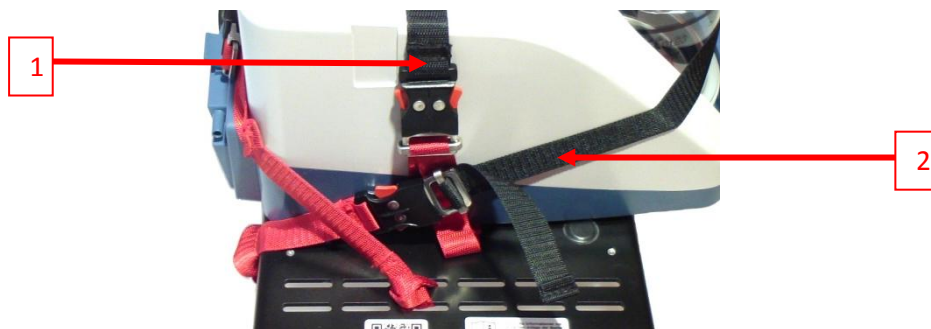

- Erst den Gurt (1) von hinten nach vorne platzieren, dann darüber den Gurt (2) von rechts nach links legen.
- Nach Positionierung des Gerätes alle Gurte schließen und festziehen.
- Bitte beachten sie auch unsere allgemeine Anleitung zum Durchschlaufen der Gurte an der Halterung.