




Artikel:	Multi-Gerätehalterung RD			
Artikel-Nr:	12315			
	Geräte-Positionierung und Gurt-Positionen für Weinmann VENTIlogic LS/plus			
	<p>Finale Position des Gerätes Weinmann VENTIlogic LS/plus</p>  <p>Benötigt werden:</p>  <p> 2 x schwarzes Gurtstück mit Kupplung 2 x schwarzes Gurtstück mit Steckern 1 x rotes Gurtstück mit Kupplung 1 x rotes Gurtstück mit Stecker </p>			
Stand:	01.10.14	Seite 1 von 3	Version: 01	MM-MH-12315-A02-01


Positionierung und Gurtpositionen für Weinmann VENTImotion2

Linke Geräte-Seite

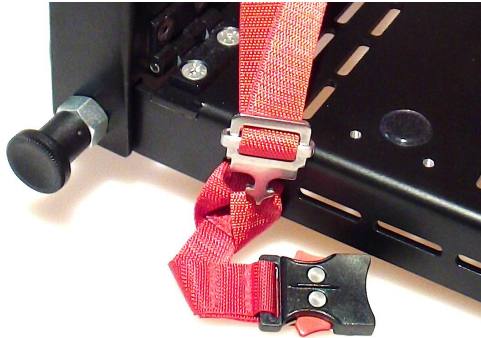


Roter Gurt mit Kupplung, 1. Loch nach dem Rastbolzen an der linken Geräteseite

Rechte Geräte-Seite

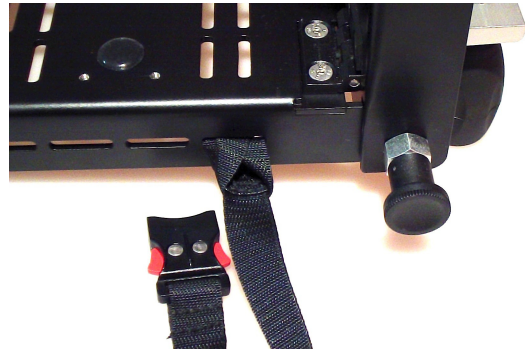

Schwarzer Gurt mit Kupplung, 1. Loch nach dem Rastbolzen an der rechten Geräteseite

Rückwand (untere Reihe)

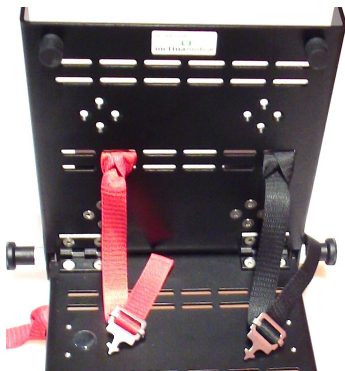

Roter Gurt mit Stecker, 2. Loch von links, schwarzer Gurt mit Stecker, 1. Loch von links


Bodenplatte (vordere Reihe)



Schwarzer Gurt mit Stecker, 2. Loch von links, Schwarzer Gurt mit Kupplung, 1. Loch von rechts,

Genauere Aufstellposition

Links muss das Gerät soweit überstehen, dass die seriellen Schnittstellen außerhalb der Halterung sind, ebenso gegenüber der O2-Anschluss.

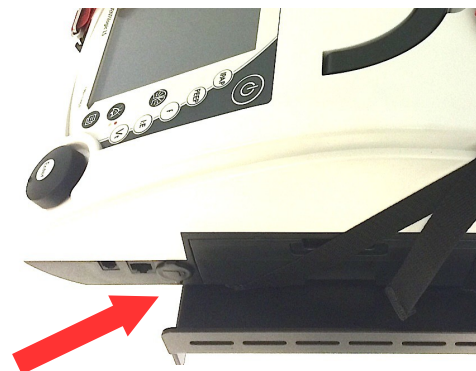

Positionierung und Gurtpositionen für **Weinmann VENTImotion2**

Linke Geräte-Seite




!! Gurtschloss muss unten sein, wie abgebildet, damit alle Anschlüsse frei sind !!

Rechte Geräte-Seite




Schwarzer Gurt mit Kupplung, 1. Loch neben dem Restbolzen an der Geräteseite (rechts)

Rückwand

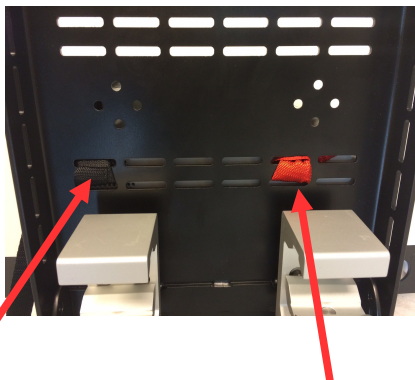

Gurt schwarz + Gurt rot jeweils mit Stecker

Gesamtansicht Gurte

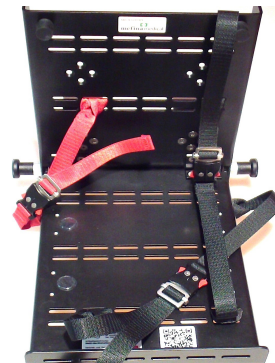

Liste + Positionen der Gurte

1 = roter Gurt linke Eckspannung

2 = schwarzer Gurt rechte Eckspannung

darüber

3 = schwarzer Gurt von der Rückwand abgehend nach vorne zur Bodenplatte

Gesamtansicht Gurte + Gerät

