

Artikel:	Multi-Gerätehalterung RD			
Artikel-Nr:	12315			
Geräte-Positionierung und Gurt-Positionen für Weinmann VENTI<i>motion</i>2				
<p>Finale Position des Gerätes Weinmann VENTI<i>motion</i>2</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Benötigt werden:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p> 1 x schwarzes Gurtstück mit Kupplung 1 x rotes Gurtstück mit Kupplung 2 x schwarzes Gurtstück mit Steckern </p>				
Stand:	01.10.14	Seite 1 von 2	Version: 01	MM-MH-12315-A01-01

Positionierung und Gurtpositionen für **Weinmann VENTImotion2**

Linke Geräte-Seite




Schwarzer Gurt mit Kupplung, 2. Loch ab Rückwand an der Geräteseite

Rechte Geräte-Seite



Schwarzer Gurt mit Stecker, 2. Loch ab Rückwand an der Geräteseite

Rückwand

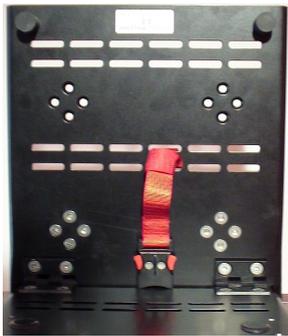

Roter Gurt mit Kupplung, 4. Loch von links in der unteren Reihe

Bodenplatte



Schwarzer Gurt mit Stecker, 4. Loch von links in der vorderen Reihe der Bodenplatte

Gesamtansicht Gurte



Gesamtansicht Gurte + Gerät



Erst den Gurt von hinten nach vorne schließen und festziehen, dann darüber liegend den Gurt von rechts nach links.