
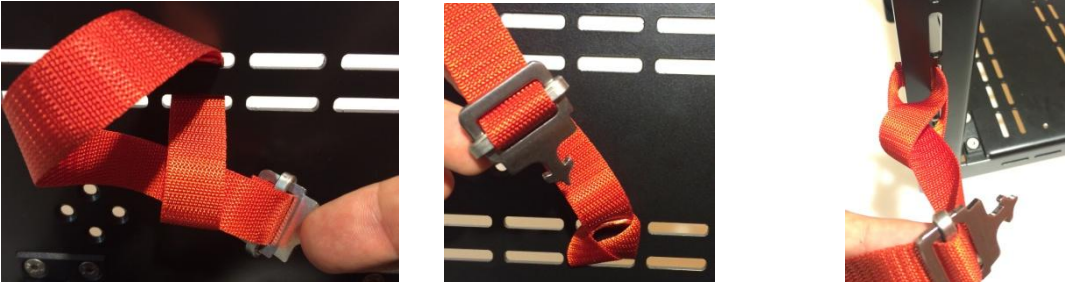






Artikel:	Multi-Gerätehalterung RD			
Artikel-Nr:	12315			
	Aufbau-/Montagehinweise:			
	<p>Die Multi-Gerätehalterung wird in zusammengeklapptem Zustand geliefert. Ziehen Sie zunächst die beiden Rastbolzen (seitlich) heraus und arretieren diese in geöffnetem Zustand (durch leichtes Verdrehen, bis die orange-rote Markierung sichtbar bleibt).</p> <p>Klappen Sie nun die Halterung auf, und verriegeln Sie die Rastbolzen wieder durch leichtes Verdrehen, so dass die orange-rote Markierung nun <u>nicht mehr</u> sichtbar ist = sicher arretierte Halterung.</p> <p>Das zu halternde Gerät kann je nach seiner Form in allen 4 Ausrichtungen – liegend oder stehend, längs oder quer - auf der Multi-Gerätehalterung arretiert werden. Legen Sie die gewünschte Ausrichtung fest, unter Beachtung möglicher Ausrichtungsvorgaben seitens des Geräteherstellers (siehe dessen Gebrauchsanweisung).</p> <p>Zur Fixierung stehen 3 geteilte Haltegurte (2 x lang schwarz und 2 x kurz rot) sowie 1 x Gurt-Verlängerung (in rot, siehe Bild 1) zur Verfügung. Schwarze und rote Teile dürfen bedarfsgerecht miteinander gemischt und kombiniert werden.</p>			
				
	Bild: Gurtverlängerung			
	Die Haltegurte werden mit ihren vernähten Endschlaufen an den gewünschten Schlitzen der Multi-Gerätehalterung durchgeschlauft und fixiert.			
				
	Beginn durchschlaufen, innen richtig eingeschlauft an Außenkanten			
	Insgesamt gibt es 60 mögliche Gurtfixierungs-Positionen, 12 an der senkrechten Rückenplatte, jeweils 5 rechts + links an der Rückenplatte, 18 an der Bodenplatte, 6 an der Vorderkante der Bodenplatte und weitere jeweils 7 rechts + links der Bodenplatte.			
	Vorgehen zur Platzierung und Fixierung des Geräts:			
	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Positionieren Sie das Gerät so, dass an der Geräteseite, welche zur Rückwand der Halterung zeigt <u>keine</u> Schläuche, Kabel o.ä. abgehen. Das Gerät muss stets direkt an der Rückwand der Halterung anstehen. 2.) Steht das Gerät rechts/links über, so muss es mittig auf der Halterung positioniert werden. 3.) Um die EN 1789 während des Fahrbetriebs im KTW, RTW oder ITW durchgehend zu erfüllen, müssen mindestens 2 Haltegurte in 2 verschiedenen Richtungen <ol style="list-style-type: none"> a) im Standard: quer und längs oder wenn nicht anders möglich: b) diagonal über 2 gegenüberliegende Ecken oder c) um die Gerätegriffe herum angelegt und festgespannt sein. Der sichere Halt des Gerätes in alle Richtungen ist anschließend manuell zu überprüfen, bei Bedarf sind weitere Gurte zu verwenden. 4.) Wählen Sie die Fixierpunkte für die Haltegurte so aus, dass diese möglichst eng am zu halternden Gerät entlanglaufen. 			
Stand:	10.11.14	Seite 1 von 3	Version: 02	MM-MSH-12315-02

Artikel:	Multi-Gerätehalterung RD			
Artikel-Nr:	12315			
	<p>5.) Die Gurte dürfen nicht nahe an einer Gerätekante angebracht werden, um ein Abrutschen der Gurte bei Vibration etc. zu verhindern.</p> <p>6.) Wählen Sie die Gurtpositionen so, dass Bedienelemente und Display des Gerätes sowie dessen Anschlüsse (für den Beatmungsschlauch, Sensoren etc.) NICHT verdeckt werden, um die Einsatzbereitschaft und Sicherheit des Produkts vollständig zu erhalten.</p>  <p>Bild: Beispiel einer Ausrichtung/ der Gurtpositionen</p> <p>Wir sind bemüht, nach und nach alle uns bekannten Geräte und künftigen neuen Geräte mit einer Empfehlung zur Anbringung der Gurte auszustatten. Diese sind stets in aktuellster Version ONLINE einsehbar. Nutzen Sie dazu bitte den QR-Code auf der Multi-Gerätehalterung oder fordern Sie die ergänzenden Hinweise bei uns an.</p> <p>Montage der Multi-Gerätehalterung an der Normschiene der Fahrzeug-Bordwand:</p> <p>Fixieren Sie die Multi-Gerätehalterung so an der Normschiene, dass die Normschiene genau in den dafür vorgesehenen Aussparungen in den Klauen platziert wird und die Klauen handfest angezogen sind. Die Halterung ist sicher angebracht, wenn die Klauen im Bereich der Normschiene kein Spiel mehr haben.</p> <p>Achten Sie darauf, dass die Multi-Gerätehalterung NICHT im Bereich von Sitzen angebracht wird, so dass im Falle einer Notbremsung o.ä. niemand in Kollision mit der Multi-Gerätehalterung oder dem dort aufgebrachten Gerät kommt und sich daran nicht verletzen kann.</p>			
Zweckbestimmung:	<p>Die Multi-Gerätehalterung ist bestimmt zur temporären Halterung und sicheren Arretierung von Medizingeräten, an Normschienen der Bordwand des Kranken-, Rettungs- oder Intensivtransportwagens, im Rahmen der Ladungssicherung.</p> <p>Folgende Größen und Gewichte sind einzuhalten.</p> <p>Minimale Gerätegröße: 12 x 12 x 5 cm Maximale Gerätegröße: 35 x 30 x 27 cm Max. Gewicht gemäß EN 1789: 7,3 kg</p> <p>Eine Nutzung dieses Produkts ist nur im europäischen Wirtschaftsraum statthaft.</p>			
Sicherheitshinweise:				
	<p>Vor jeder Inbetriebnahme ist die Multi-Gerätehalterung samt Gurten einer Sicht- und Vollständigkeitsprüfung zu unterziehen.</p> <p>Die Multi-Gerätehalterung darf NICHT an Fahrtragen, Tragestühlen o.ä. adaptiert werden.</p> <p>Eine Ummontage der rückseitigen Halteklauen ist NICHT statthaft.</p> <p>Beide seitlichen Rastbolzen müssen sicher eingerastet sein. Dies ist der Fall, wenn die orange-rote Markierung an jedem Rastbolzen nicht mehr sichtbar ist.</p>			
Stand:	10.11.14	Seite 2 von 3	Version: 02	MM-MSH-12315-02

Artikel:	Multi-Gerätehalterung RD			
Artikel-Nr:	12315			
	Sicherheitshinweise Teil 2:			
	<p>Die Gurtschlösser aller angelegten Haltegurte – ggf. mitsamt ihrer roten Verlängerung – müssen sicher eingerastet sein.</p> <p>Der Hersteller dieser Multi-Gerätehalterung haftet nur für die Halterung selbst, nicht für gehaltene Geräte.</p> <p>Bitte beachten Sie zwingend die Gebrauchsanweisung des jeweils montierten Gerätes, insbesondere zur sicheren Arretierung von Verbindungen zum/vom Patienten und den sonstigen Sicherheits- und Anwendungshinweisen.</p> <p>Stellen Sie eine ausreichende Energieversorgung und einen Einsatzbereiten Geräteakku sicher.</p> <p>Achten Sie darauf, dass Sie beim Öffnen oder Schließen der Halterung keine Finger zwischen Bodenplatte und Rückwand-Platte legen, es besteht Klemmgefahr.</p>			
	Reinigung und Desinfektion:			
	<p>Die Multi-Gerätehalterung kann zur Reinigung mit Wasser abgespült werden und mit milder Reinigungslösung feucht abgewischt werden. Die Gurte können in Reinigungslösung eingelegt oder bei 60 Grad C. in einem Schutzbeutel in der Industrie-Waschmaschine gewaschen werden.</p> <p>Eine Flächendesinfektion wird als Sprüh- und Wischdesinfektion durchgeführt. Hierzu eignen sich alle gängigen Flächendesinfektionsmittel gemäß VAH-Liste. Bitte beachten Sie die jeweilige Konzentration und Einwirkdauer nach Vorschrift des Desinfektionsmittel-Herstellers.</p>			
Vertrieb & Service:	Firma Mefina Medical GmbH & Co. KG, Schimmelbuschstr. 31, D-40699 Erkrath Tel.: 0 21 04 - 8 33 80 - 0 / www.mefina-medical.de / info@mefina-medical.de			
Rechte:	Das Produkt ist durch Urheberrecht und weitere Schutzrechte geschützt. Alle Rechte am Produkt und dem Vertrieb liegen bei: Firma Mefina Medical GmbH & Co. KG			
Normen:	Die Multi-Gerätehalterung RD ist erfolgreich dynamisch geprüft gemäß DIN EN 1789:2010			
Stand:	10.11.14	Seite 3 von 3	Version: 02	MM-MSH-12315-02