

EyePro® Augenpflaster

einfach. sicher. schützend.

Fahrtragen-Systeme

Tragestühle/-sessel

Transport-Inkubatoren

Mobile Intensivsysteme

Medizin-Produkte

Früh-Defibrillation

Rettungsprodukte

Rollboards/Transferhilfen

Simulationssysteme

Auftragsentwicklung

Notfall-Management

Medizinische Seminare



EyePro[®] – der sichere Augenschutz

Das von einem Anästhesisten entwickelte Augenschutzpflaster **EyePro[®]** sorgt für ein geschlossenes Augenlid während einer Narkose oder einer tiefen Sedierung z. B. auf Intensivstationen. Dabei garantiert es ein schnelles, vollständiges und sicheres Schließen des Augenlids. Durch das Abdichten rund um das Auge wird ein Feuchtigkeitsverlust verhindert und somit das Organ vor dem Austrocknen geschützt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen medizinischen Klebebändern, die beim Auftragen und Entfernen schwer zu handhaben sind, kann das **EyePro[®]** mit seinen nicht-haftenden Streifen auch mit Handschuhen schnell und einfach angebracht werden.

Das Folienfenster erleichtert die Sichtkontrolle zur Sicherstellung, dass das Auge auch geschlossen ist.

Die innere Zone des **EyePro[®]**s enthält einen schwachen Klebstoff, um das Auge geschlossen zu halten. Dabei sorgt der geringe Auftrag des Klebemittels, dass beim Entfernen des Augenpflasters keine Wimpern ausgerissen oder Hautbereiche verletzt werden können.

Die äussere Zone des Augenpflasters enthält einen stärkeren Klebstoff, der zusätzlich zum Verschluss des Auges beiträgt und einen wirksamen Schutz gegen das Eindringen von fremden Substanzen bildet.

Jedes Paar der **EyePro[®]**s ist steril verpackt, um die Gefahr einer Kreuzkontamination zu verhindern.

Alle Eigenschaften auf einen Blick

- Verhindert dank Sterilität die Verbreitung von Krankenhauskeimen wie VRE oder MRSA
- Einfaches Anlegen und Entfernen
- Reduziert die Gefahr einer Hornhautverletzung und Exposure-Keratopathie
- Das durchsichtige Fenster ermöglicht die direkte Kontrolle, dass das Auge geschlossen ist
- Liegt rund um das Auge eng an und verhindert damit das Austrocknen oder eine Kontamination
- Spart Zeit im OP-Saal und damit Geld



Sichtfenster
zur Kontrolle des
geschlossenen
Auges

**nicht-haftender
Streifen zum
leichteren
Entfernen**

äußere Zone,
liegt eng am
Auge an

Hersteller gemäß MDR: Innovgas Pty Ltd, PO Box 1 063, Launceston, TAS 7250, Australia. Vertrieb über Mefina Medical. Die Produkte dieses Flyers tragen die CE-Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EU) 2017/745. Alle Informationen richten sich nur an Fachkreise gemäß Heilmittelwerbegesetz (HWG). Unser Angebot und alle Informationen richten sich ausdrücklich nicht an Laien/Patienten. Die im Prospekt gezeigten Abbildungen können vom Produkt abweichen. Sortimentsänderungen sind vorbehalten. In diesem Prospekt sind Markennamen genannt, welche in mehreren Ländern eingetragene Marken der jeweiligen Firmen/Institutionen sind. Mefina Medical ist als Marke ebenfalls geschützt.

Vertrieb durch Mefina Medical nur in Deutschland!

Deutschland

Mefina Medical GmbH & Co. KG
Falkenberger Weg 42
D-40699 Erkrath
Telefon: +49 (0)21 04 / 833 80-0
E-Mail: info@mefina-medical.de
Internet: mefina-medical.de

