















1. Beginn der Therapie

- Gerät einschalten 
- Vordere Klappe öffnen, Spritzenbügel umlegen, Spritze einlegen, Klappe und Spritzenbügel schließen
- Sprizentyp bestätigen 
- Verbindung des entlüfteten Systems zum Patienten, ggf. Fragen die im Display stehen mit  oder  beantworten bis die **Rate** im Display erscheint
-  drücken und die Rate mit  eingeben
- Zum Starten der Infusion 




2. Ändern der Förderrate

- Die Pumpe mit  stoppen und mit  im Hauptmenü „Rate“ auswählen
-  drücken und die Rate mit  einstellen
- Um die Infusion mit neuer Rate auszunehmen  drücken

3. Ändern der Förderrate bei laufender Therapie

-  drücken und die Rate mit  eingeben, anschließend mit  bestätigen

4. Bolusgabe

- Manueller Bolus:  drücken,  gedrückt halten bis gewünschter Bolus verabreicht ist
- Bolus mit Vorwahl des Volumens:  drücken,  drücken, mit  Bolusgröße auswählen, zum starten  drücken

* Diese Hinweise ersetzen nicht die Einweisung, die Gebrauchsanweisung und deren Kenntnisnahme, sondern sind nur eine Übersicht für den Routinegebrauch.