

Artikel:	Multi-Gerätehalterung RD
Artikel-Nr:	12315
	Geräte-Positionierung und Gurt-Positionen für Philips-BiPAP A40 und A30

Finale Position des Geräts **Philips-BiPAP A40**



Benötigt werden:



- 2 x schwarzes Gurtstück mit Steckern
- 2 x schwarzes Gurtstück mit Kupplung
- 1 x rotes Gurtstück mit Steckern
- 1 x rotes Gurtstück mit Kupplung

Stand:	2.04.2015	Seite 1 von 4	Version: 01	MM-MH-12315-A09-01
--------	-----------	---------------	-------------	--------------------


Positionierung und Gurtpositionen für Philips-BiPAP A40

Linke Geräte-Seite




schwarzer Gurt mit Stecker:
3. Loch von rechts

Rechte Geräte-Seite

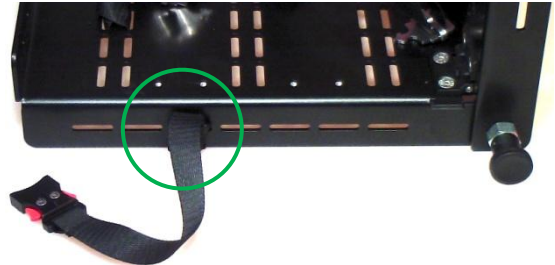


schwarzer Gurt mit Kupplung:
3. Loch von Links

Bodenplatte (mittlere / Vordere Reihe)

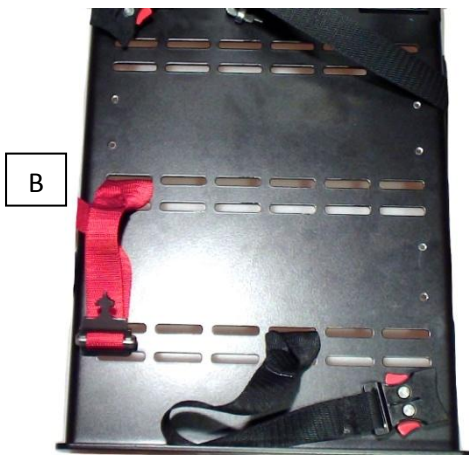


A. schwarzer Gurt mit Kupplung:
3. Loch von rechts
B. roter Gurt mit Stecker:
1. Loch Links

Rückenwand (untere Reihe)

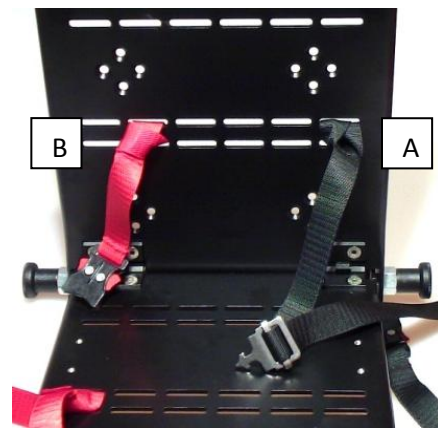

A. schwarzer Gurt mit Stecker:
1. Loch von Rechts
B. roter Gurt mit Kupplung:
2. Loch von Links

Gesamtansicht Gurte

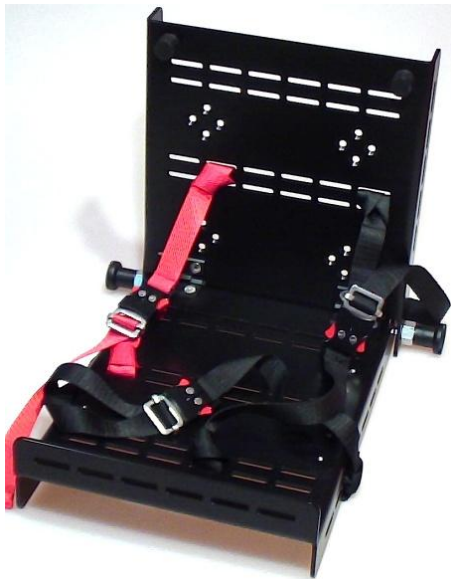

Gesamtansicht Gurte + Gerät



Aufstellposition/Anschlüsse



- Anschlüsse des **Philips-BiPAP A40** müssen immer frei bleiben (siehe Rote Markierungen)

Aufstellposition/Anschlüsse



- Alle Gurtverschlüsse wie im Bilder Platzieren

Aufstellposition/Anschlüsse



- Anschlüsse des **Philips-BiPAP A40** müssen immer frei bleiben (siehe Bild)

Aufstellposition/Anschlüsse



- Das Gerät bündig an die Rückwand anstellen. Vorne bleibt ein Freiraum

- Nach Positionierung des Gerätes alle Gurte schliessen und fest anziehen.