

Artikel:	<b>Multi-Gerätehalterung RD</b>
Artikel-Nr:	<b>12315</b>
	Geräte-Positionierung und Gurt-Positionen für <b>RESMED Astral 150</b>

**Finale Position** des Geräts **RESMED Astral 150**



Benötigt werden:



- 1 x schwarzes Gurtstück mit Kupplung
- 2 x schwarzes Gurtstück mit Stecker
- 2 x rotes Gurtstück mit Kupplung
- 1 x rotes Gurtstück mit Stecker

Stand:	02.12.2014	Seite 1 von 3	Version: 01	MM-MH-12315-A04-01
--------	------------	---------------	-------------	--------------------


**Positionierung und Gurtpositionen für RESMED Astral 150**

**Linke Geräte-Seite**



Schwarzer Gurt mit Stecker:  
2. Loch nach dem Rastbolzen

**Rechte Geräte-Seite**

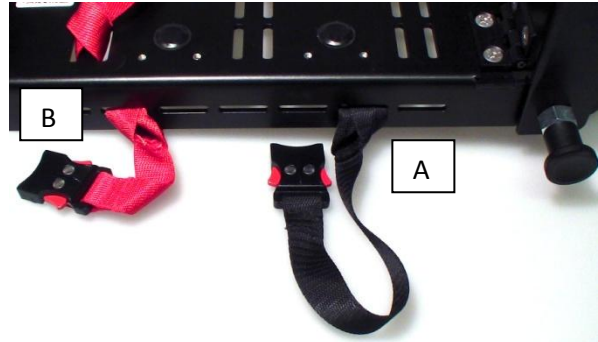

- A) Schwarzer Gurt mit Kupplung:  
2. Loch nach dem Rastbolzen
- B) Roter Gurt mit Kupplung:  
6. Loch nach dem Rastbolzen

**Rückenwand linke Seite**



Schwarze Gurt mit Stecker:  
1. Loch von oben


**Bodenplatte (vordere Reihe)**



Roter Gurt mit Stecker:  
1. Loch von links

Roter Gurt mit Kupplung:  
1. Loch von rechts


### Gesamtansicht Gurte

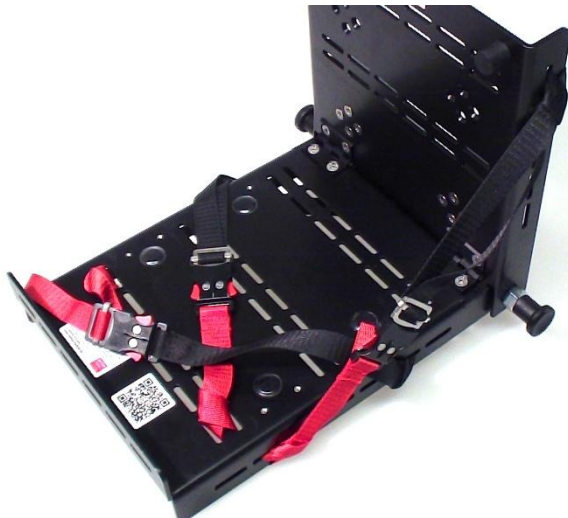

### Gesamtansicht Gurte+ Gerät



### Genauere Aufstellposition

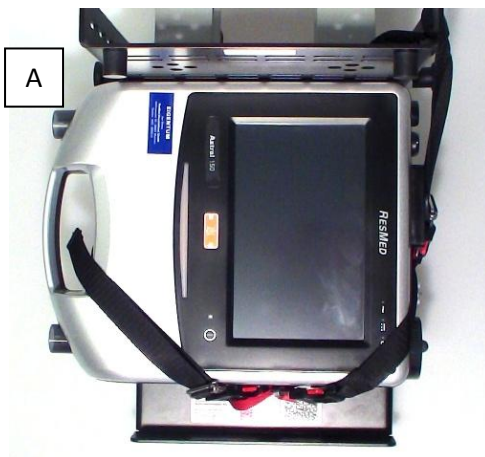

- Das Gerät bündig an die Rückwand anstellen (A). Vorne bleibt ein Freiraum (B)
- Die Gurtverschlüsse müssen an den Seiten des Gerätes sein (C) und dürfen nicht auf der Geräteoberseite liegen.