


Artikel:	<b>Multi-Gerätehalterung RD</b>
Artikel-Nr:	<b>12315</b>
	Geräte-Positionierung und Gurt-Positionen für <b>Hoffrichter CARAT II plus</b>

**Finale Position** des Geräts **Hoffrichter CARAT II plus**

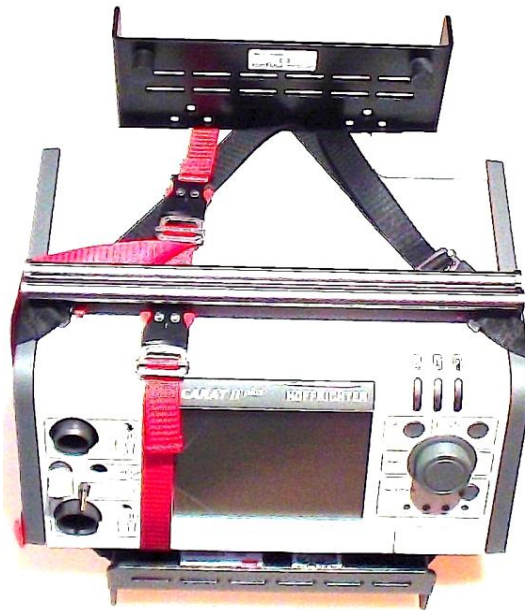


Benötigt werden:



- 2 x schwarzes Gurtstück mit Stecker
- 2 x schwarzes Gurtstück mit Kupplung
- 1 x rotes Gurtstück mit Stecker
- 1 x roter Verlängerungsgurt mit Kupplung + Stecker
- 1 x rotes Gurtstück mit Kupplung


Positionierung und Gurtpositionen für **Hoffrichter CARAT II plus**

**Linke Geräteseite**

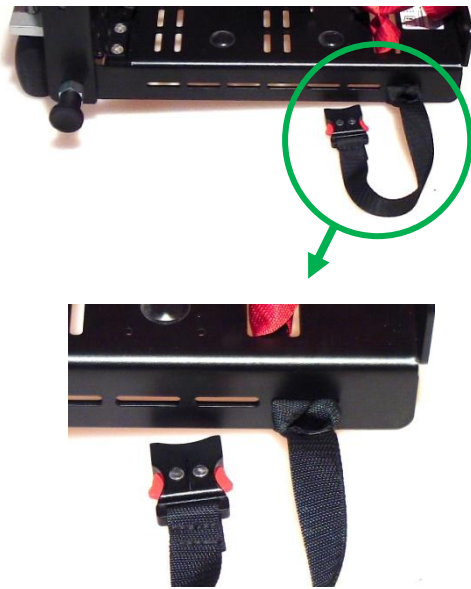

schwarzer Gurt mit Kupplung:  
7. (vorderstes) Loch in der Abkantung


**Rechte Geräteseite**

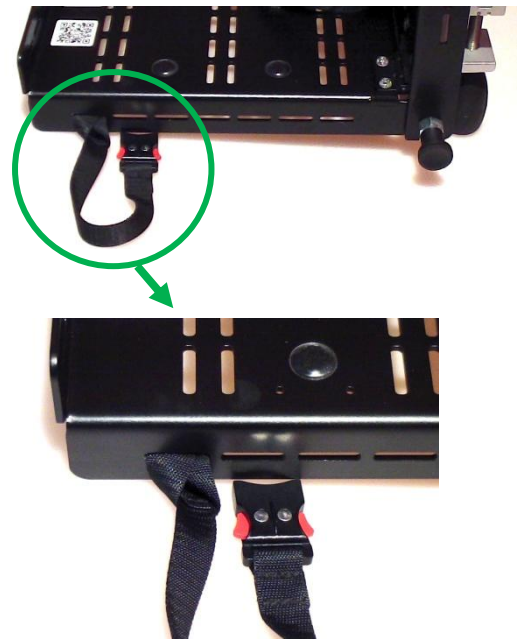

schwarzer Gurt mit Kupplung:  
7. (vorderstes) Loch in der Abkantung

**Bodenplatte (vordere Reihe)**


roter Gurt wird mit  
roter Verlängerung  
verbunden

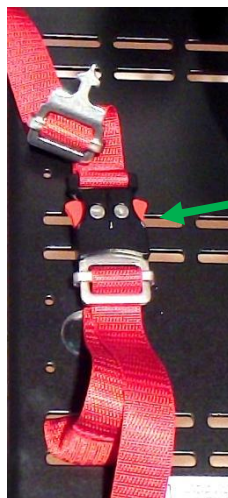

roter Gurt mit Stecker:  
vordere Reihe 1. Loch von links


Positionierung und Gurtpositionen für **Hoffrichter CARAT II plus**

**Rückwand**

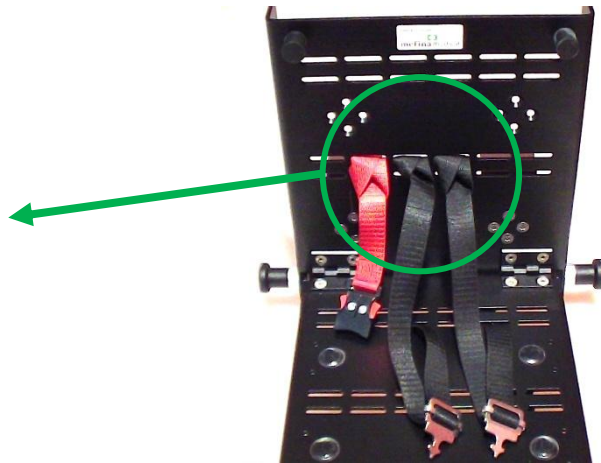

- roter Gurt mit Kupplung: 2. Loch von links in der unteren Reihe
- schwarzer Gurt mit Stecker: 3. Loch von links in der unteren Reihe
- schwarzer Gurt mit Stecker: 4. Loch von links in der unteren Reihe


**Gesamtansicht Gurte**

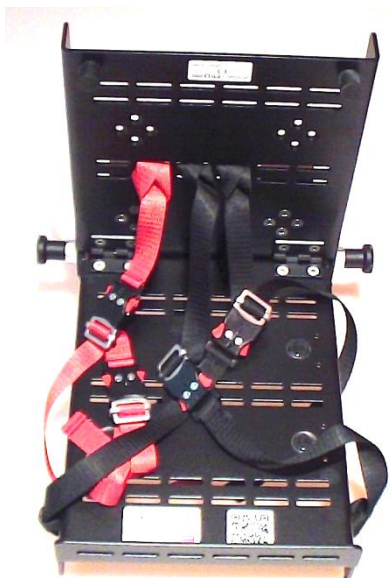

**Gesamtansicht Gurte + Gerät**




### Genauere Aufstellposition

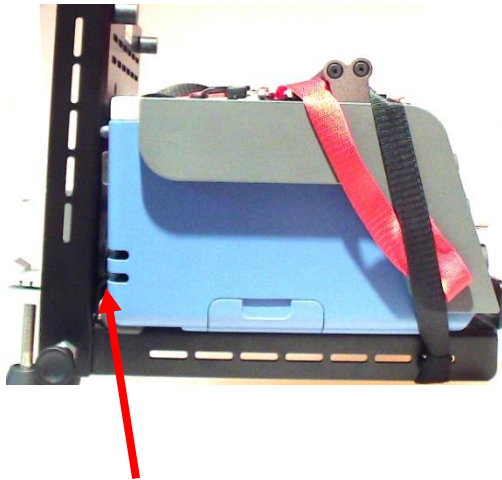

Das Gerät bündig an die Rückwand stellen;  
vorne bleibt ein Freiraum

### Gurtverschlüsse

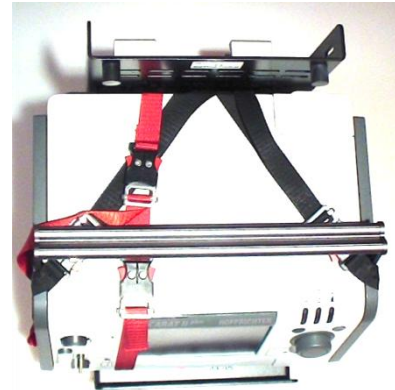

Die Gurtverschlüsse müssen auf  
der Geräteoberseite liegen. (siehe Foto)

### Gurte unter dem Handgriff



- Der rote Verlängerungsgurt wird unter den Handgriff geführt, mit dem rotem Gurt verbunden und Richtung Bodenplatte festgezogen. (siehe Foto)
- Die beiden schwarzen Gurte mit Stecker (an der Rückwand) werden diagonal nach außen unter dem Handgriff durchgeführt und mit den beiden schwarzen Gurten mit Kupplung verbunden und festgezogen. (siehe Foto)
- Für die Vorgehensweise beim Durchschlaufen der Gurte an der Halterung verwenden Sie unseren Leitfaden