

Artikel:	Multi-Gerätehalterung RD
Artikel-Nr:	12315
	Geräte-Positionierung und Gurt-Positionen für Hoffrichter CARAT II pro

Finale Position des Geräts **Hoffrichter CARAT II pro**




Benötigt werden:



- 1 x schwarzes Gurtstück mit Kupplung
- 2 x schwarzes Gurtstück mit Steckern
- 1 x rotes Gurtstück mit Stecker
- 1 x rote Verlängerung mit Kupplung + Stecker
- 2 x rotes Gurtstück mit Kupplung


Positionierung und Gurtpositionen für Hoffrichter CARAT II pro

Linke Geräteseite

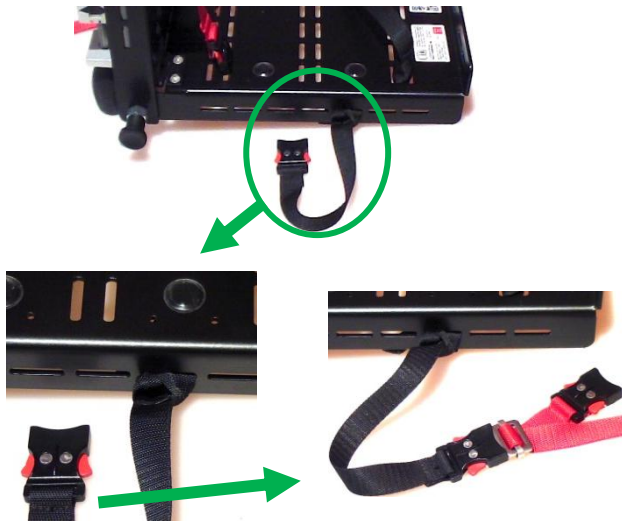


schwarzer Gurt mit Kupplung:
 5. Loch nach dem Rastbolzen
 schwarzer Gurt wird mit roter
 Verlängerung verbunden

Rechte Geräteseite

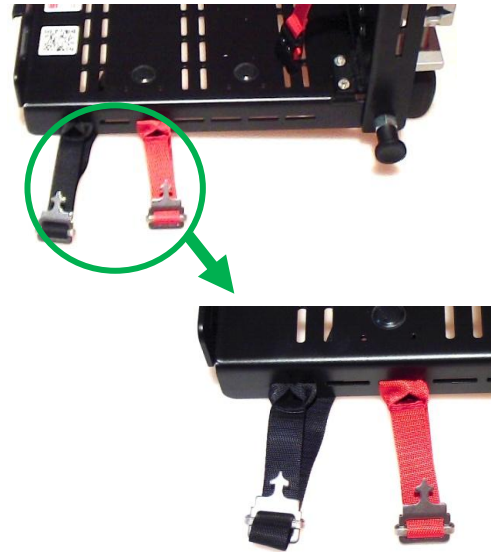


schwarzer Gurt mit Stecker:
 7. Loch nach dem Rastbolzen
 roter Gurt mit Stecker:
 5. Loch nach dem Rastbolzen

Rückwand

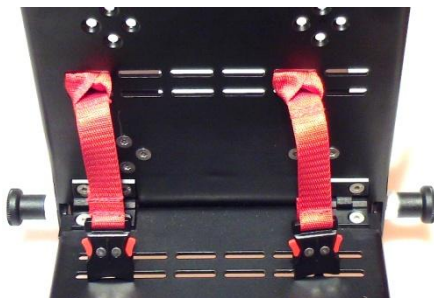

2 rote Gurte mit Kupplung:
 1. Loch von links in der unteren Reihe
 5. Loch von links in der unteren Reihe

Bodenplatte (vordere Reihe)

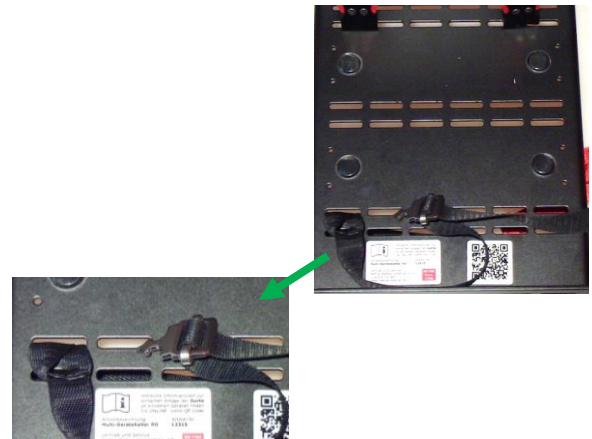

schwarzer Gurt mit Stecker:
 vordere Reihe 1. Loch von links

Positionierung und Gurtpositionen für **Hoffrichter CARAT II pro**



Gesamtansicht Gurte



Gesamtansicht Gurte + Gerät




Genauere Aufstellposition

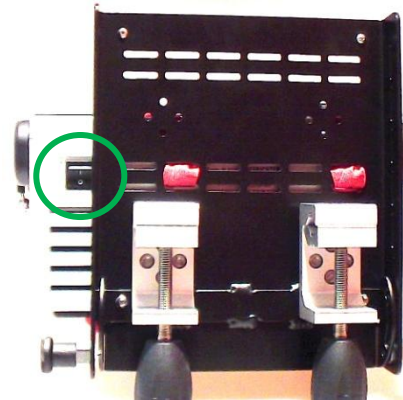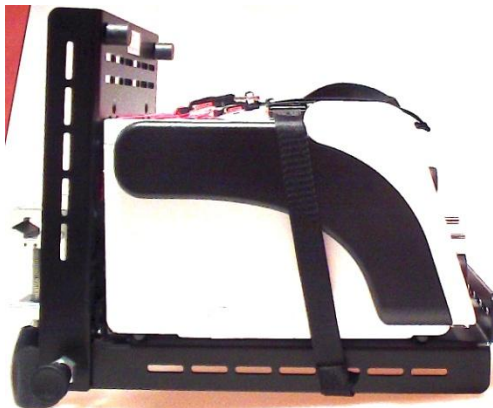

- Der Monitor muss auf der Bodenplatte bündig gegen die Rückwand angestellt werden.
- Der Ein-/Aus-Schalter an der Rückseite des Gerätes muss seitlich frei bleiben (siehe grüne Markierungen).

Positionierung und Gurtpositionen für Hoffrichter CARAT II pro

Gurtverschlüsse

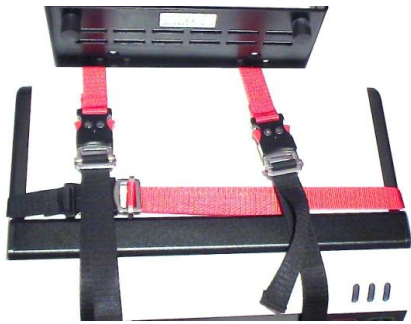

Die beiden roten Gurte mit Kupplung (an der Rückwand) werden mit den beiden schwarzen Gurten mit Stecker (an Bodenplatte und rechter Seite) verbunden und festgezogen.

Gurtverschlüsse



Der rote Verlängerungsgurt verbindet die beiden geschlaufenen Gurte der rechten (roter Gurt mit Stecker) und linken Seite (schwarzer Gurt mit Kupplung).

Gurtverschlüsse



- Für die Vorgehensweise beim Durchschlaufen der Gurte an der Halterung verwenden Sie unseren Leitfaden