

Artikel:	Multi-Gerätehalterung RD
Artikel-Nr:	12315
	Geräte-Positionierung und Gurt-Positionen für ResMed - Stellar 150

Finale Position des Geräts **ResMed - Stellar 150**




Benötigt werden:



- 2 x schwarze Gurtstücke mit Stecker
- 2 x schwarze Gurtstücke mit Kupplung
- 1 x rotes Gurtstück mit Stecker
- 1 x rotes Gurtstück mit Kupplung


Positionierung und Gurtpositionen für ResMed - Stellar 150

Linke Geräteseite

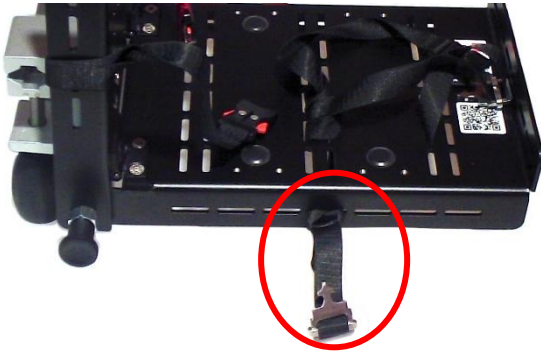

schwarzer Gurt mit Stecker
in mittleren Loch

Bodenplatte

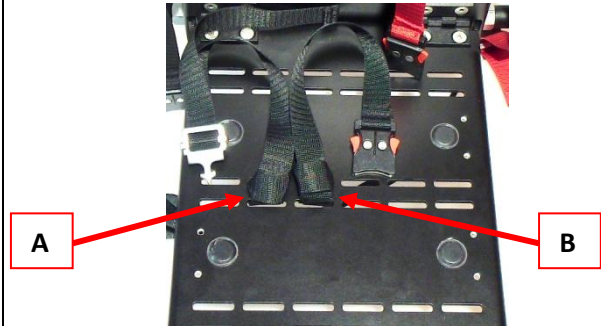


Gurte in der mittleren Lochreihe
der Bodenplatte:

A. schwarzer Gurt mit Stecker
2. Loch von links

B. schwarzer Gurt mit Kupplung
3. Loch von links

Rückwand

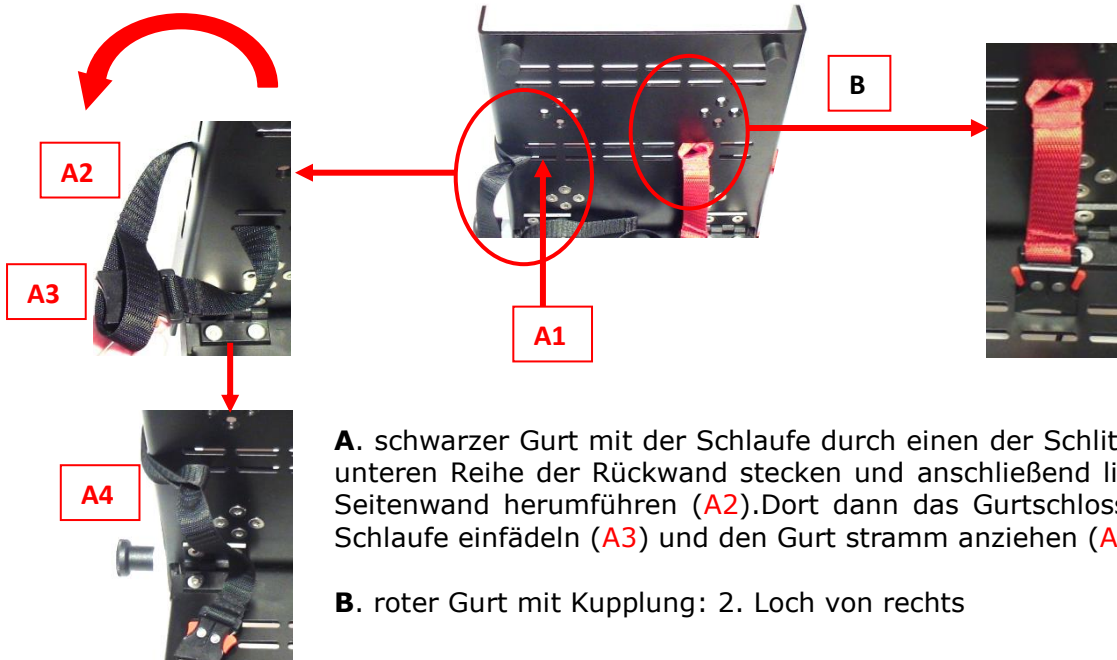


A. schwarzer Gurt mit der Schlaufe durch einen der Schlitz (A1) der unteren Reihe der Rückwand stecken und anschließend links um die Seitenwand herumführen (A2). Dort dann das Gurtschloss durch die Schlaufe einfädeln (A3) und den Gurt stramm anziehen (A4).

B. roter Gurt mit Kupplung: 2. Loch von rechts

Positionierung und Gurtpositionen für **ResMed - Stellar 150**

Gesamtansicht Gurte

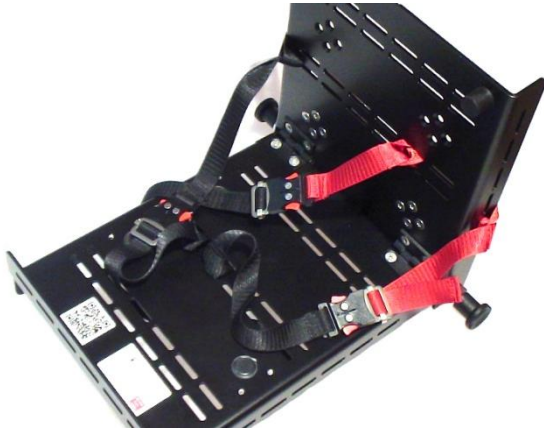


Rückwand (rechte Seite)



- roter Gurt mit Stecker
1. Loch oberhalb des Rastbolzens


Genauere Aufstellposition

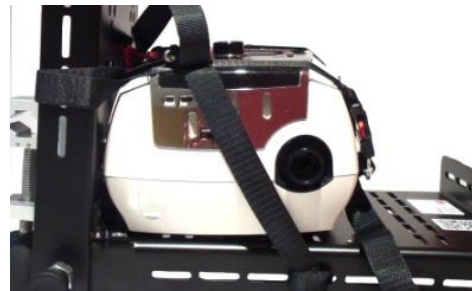

- Das Gerät muss auf der Bodenplatte bündig gegen die Rückwand angestellt werden.
- Anschlüsse müssen immer frei bleiben. (siehe Bilder)

Positionierung und Gurtpositionen für ResMed - Stellar 150

Gurtverschlüsse

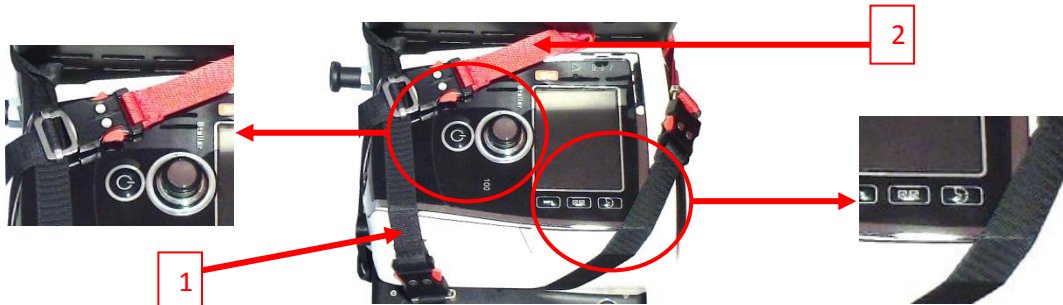

- Tasten und Display müssen immer frei bleiben. (siehe Bilder)
- Erst den schwarzer Gurt (1) von hinten nach vorne platzieren, dann darüber den Gurt (2) von rechts nach links legen.

Gurtverschlüsse



- Gurtverschlüsse gemäß Bildern platzieren.
- Nach Positionierung des Gerätes alle Gurte schließen und festziehen.
- Bitte beachten Sie auch unsere allgemeine Anleitung zum Durchschlaufen der Gurte an der Halterung.