



Montageanleitung Stativ auf Kniehöhe für Stryker Power-PRO 2

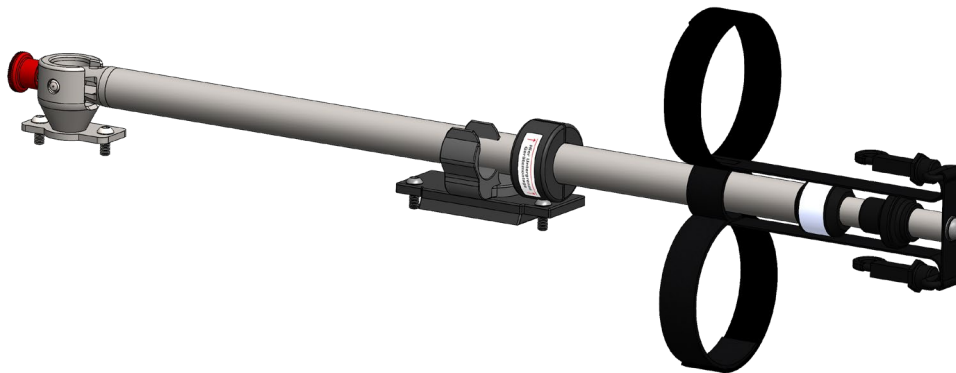

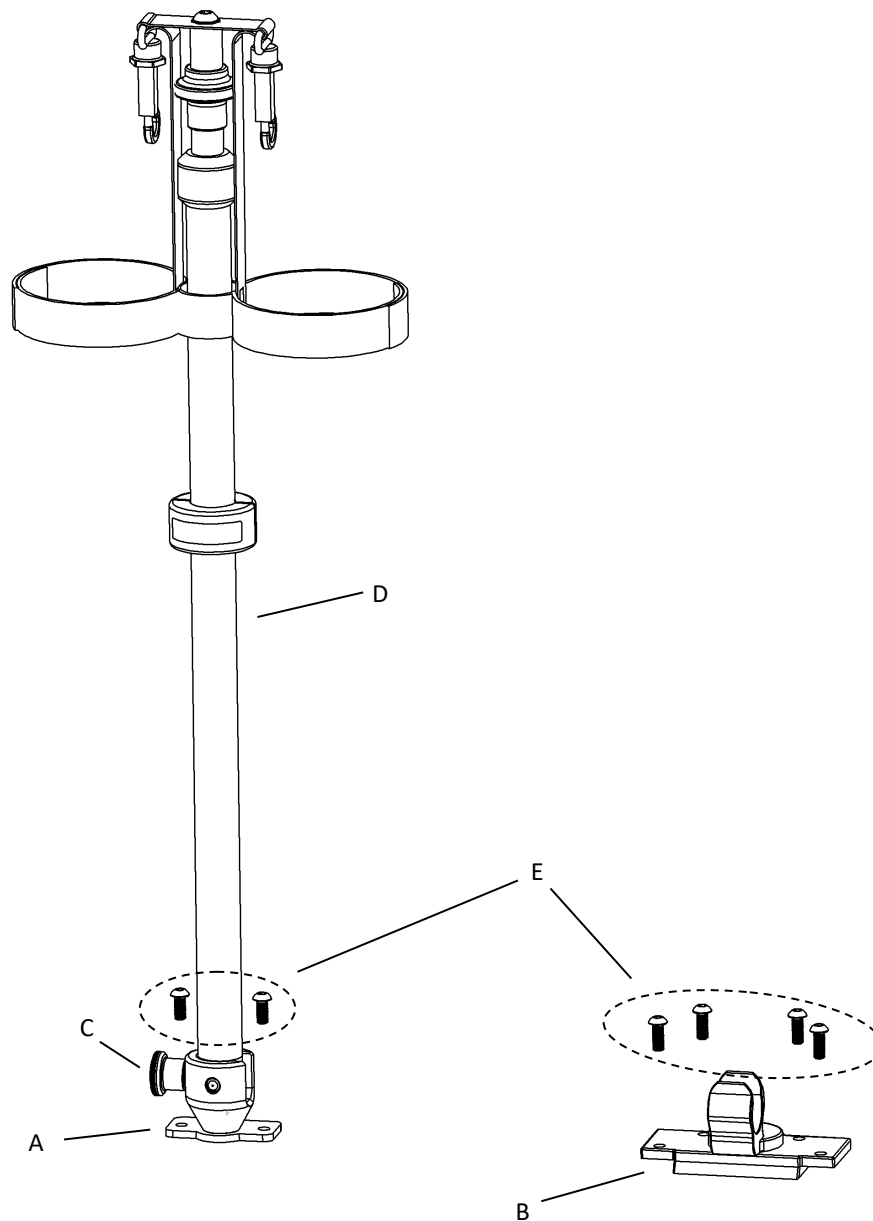

1 Lieferumfang

Bezeichnung	Artikel	Anzahl
A	Verbindungsblech mit Stativsockel	1
B	Verbindungsblech mit Halteclip und Füllplatte	1
C	Rastbolzen	1
D	Stativ	1
E	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant M6 x 16 schwarz	6

2 Benötigte Werkzeuge/Material

Inbusschlüssel Gr. 4

Maulschlüssel Gr. 13

Schraubensicherung mittelfest





In dieser Montageanleitung wird die Montage des Stativs auf Kniehöhe auf der rechten Patientenseite der Stryker Power-PRO 2 beschrieben. Die Montage des linksseitigen Stativs auf Kniehöhe erfolgt analog zu der hier beschriebenen Montage.

3 Montage


Montageschritt 1: Vorbereitung des Stativs auf Kniehöhe

Bringen Sie das Stativ, für die weitere Montage, in aufrechte Position

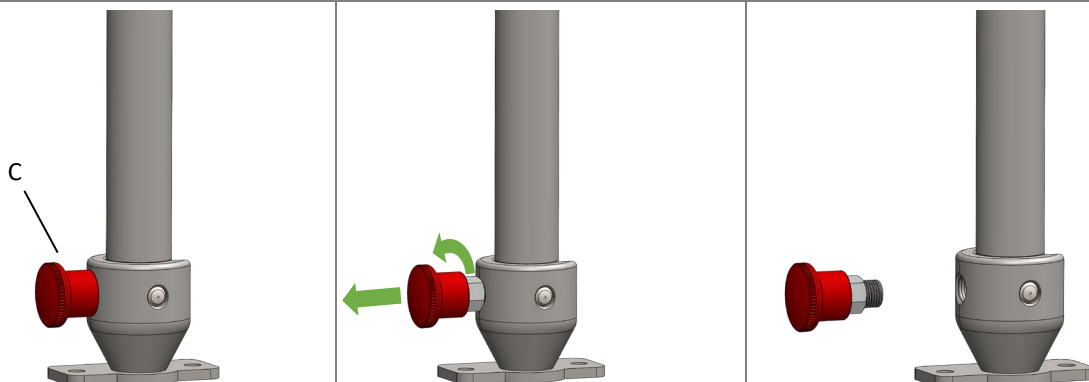
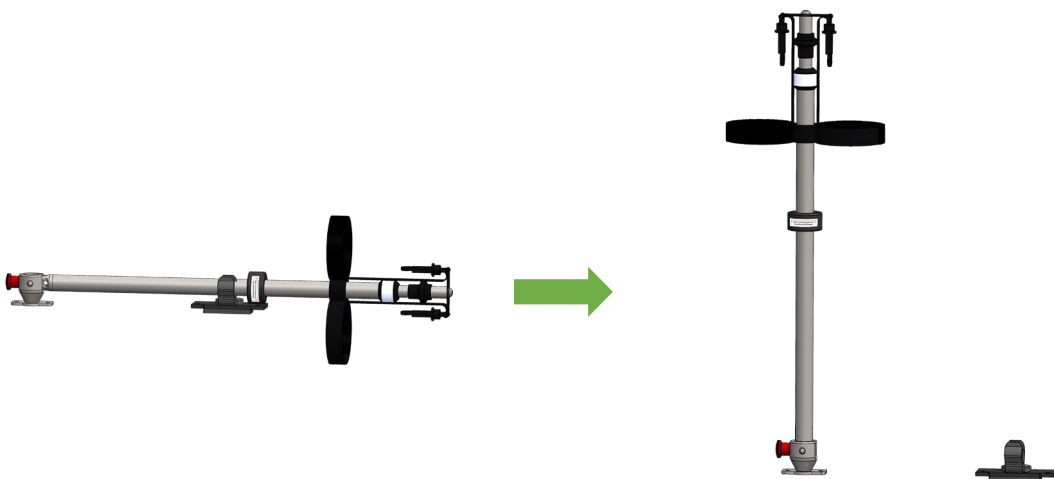



- Demontage des Rastbolzens (C) durch Ziehen roten Knopfs und Herausdrehen an der nun sichtbaren Sechskantfixierung mit einem Maulschlüssel Gr. 13.

Montageschritt 2: Positionierung des Stativs auf Kniehöhe an der Trage

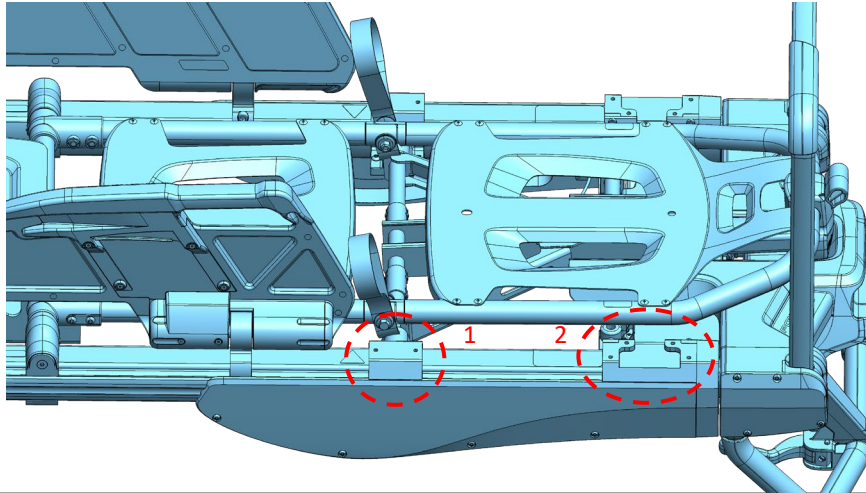


- Zur Positionierung und Montage des Verbindungsblechs mit Stativsockel (A) dient die hier markierte Position 1.
- Zur Positionierung und Montage des Verbindungsblechs mit Halteclip und Füllplatte (B) dient die hier markierte Position 2.

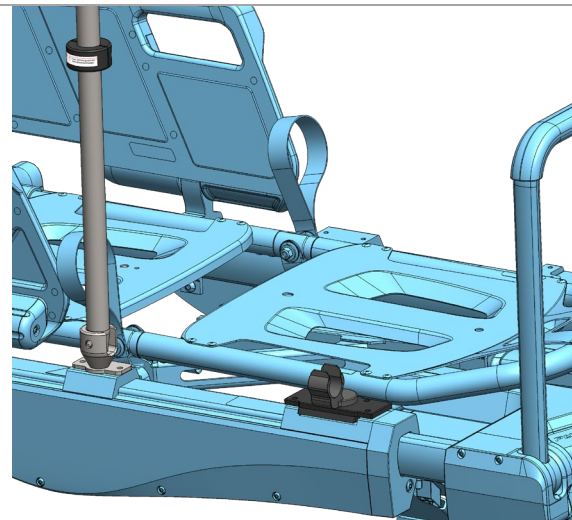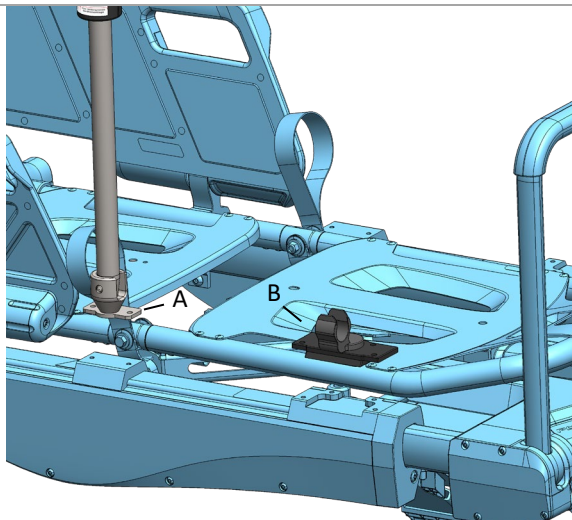


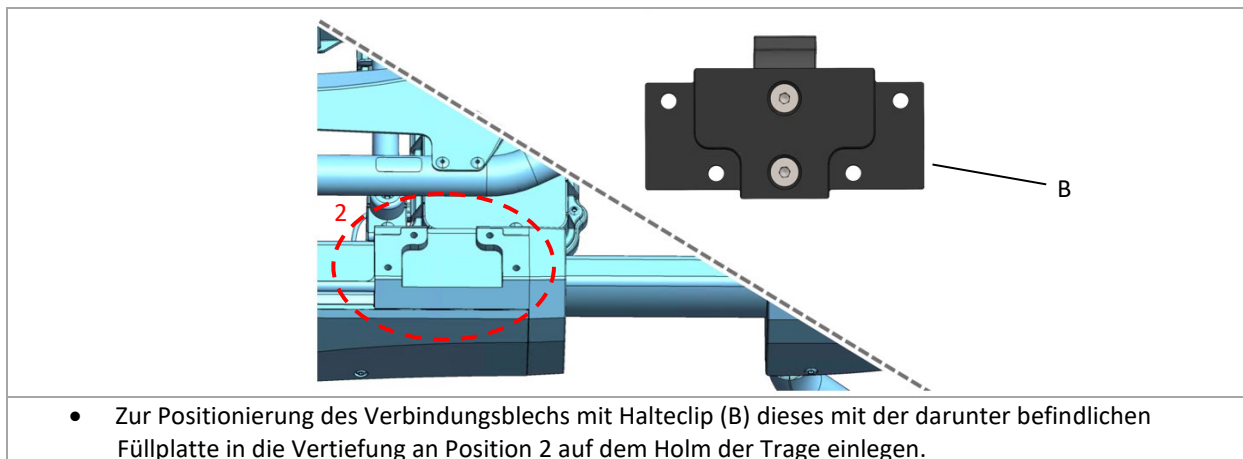

Montageschritt 3: Montage des Stativs auf Kniehöhe an der Trage

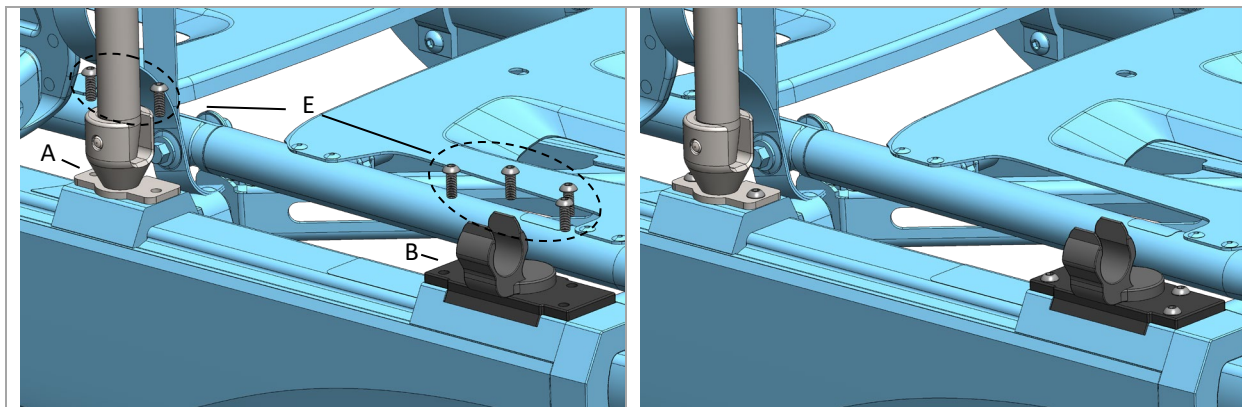


- Verschrauben der Verbindungsbleche mit Stativsockel (A) und Halteclip (B) mit dem Holm der Trage unter Verwendung der sechs Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant (E).
(Schraubensicherung mittelfest verwenden)

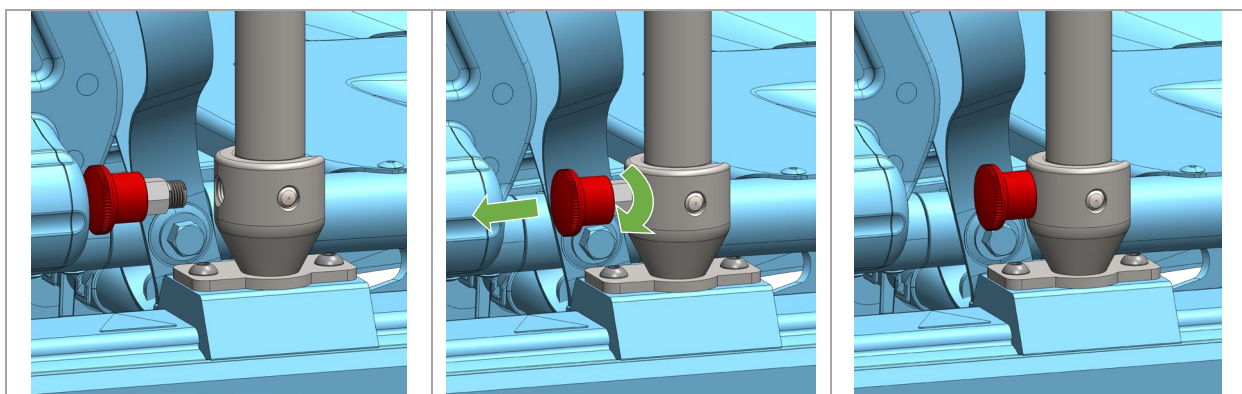

- Montage des Rastbolzens (C) durch zunächst leichtes Eindrehen per Hand, bis das Gewinde merklich greift. Dann am Rastbolzen ziehen, bis die Sechskantfixierung sichtbar ist.
- Finales Festziehen der Sechskantfixierung mit Hilfe eines Maulschlüssels Gr. 13.

4 Finale Ansicht

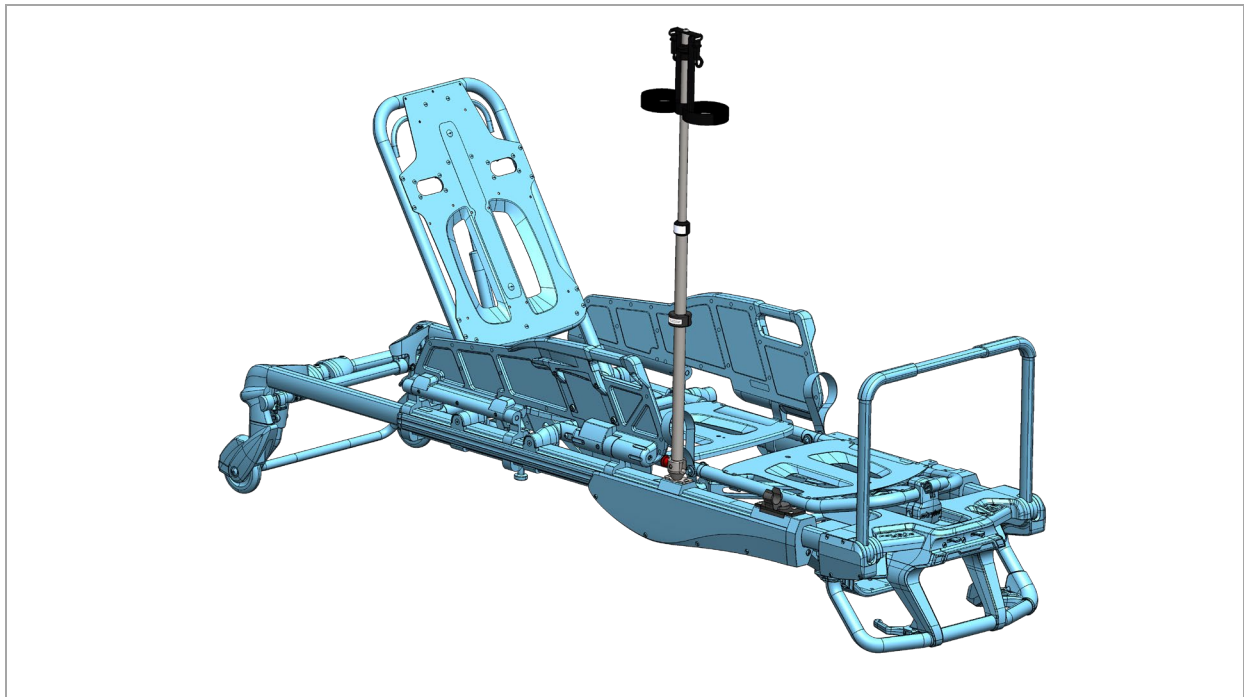

Artikelnummer/-n	16386, 16387
Letzte Änderung am	18.04.2024
Letzte Änderung durch	Stefan Fischer
Version des Dokuments	2.0