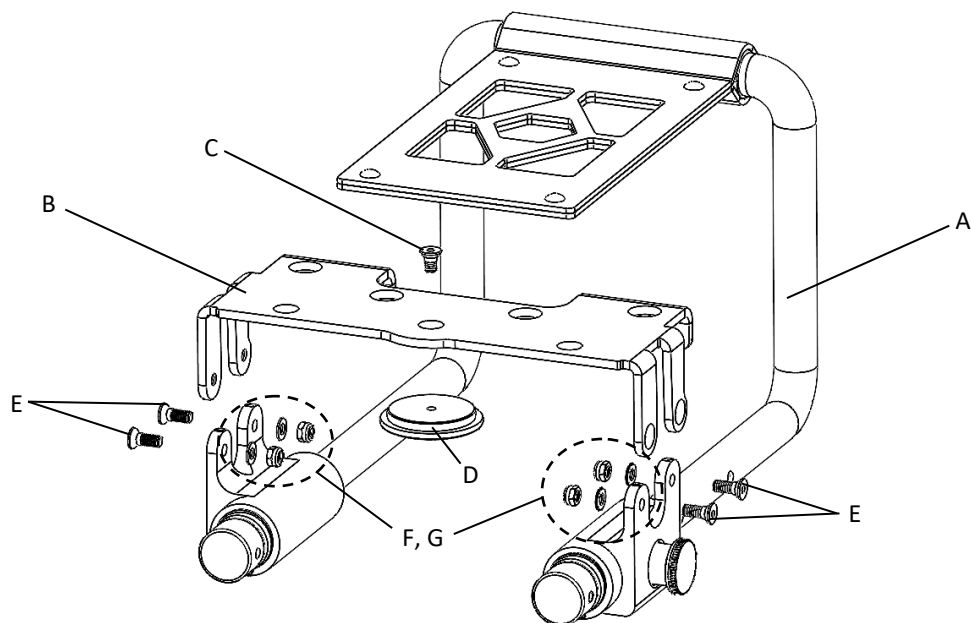


# Montageanleitung Kopfteilverlängerung (KTV) für Stryker Power-PRO TL





## 1 Lieferumfang

| Bezeichnung | Artikel                                     | Anzahl |
|-------------|---|--------|
| A           | KTV-Gestänge                                | 1      |
| B           | KTV-Befestigungsmodul                       | 1      |
| C           | Senkkopfschraube mit Innensechskant M5 x 10 | 1      |
| D           | Gewindescheibe M5                           | 1      |
| E           | Senkkopfschraube mit Innensechskant M5 x 14 | 4      |
| F           | Sechskantmutter mit Sicherungsring M5       | 4      |
| G           | Unterlegscheibe M5                          | 4      |

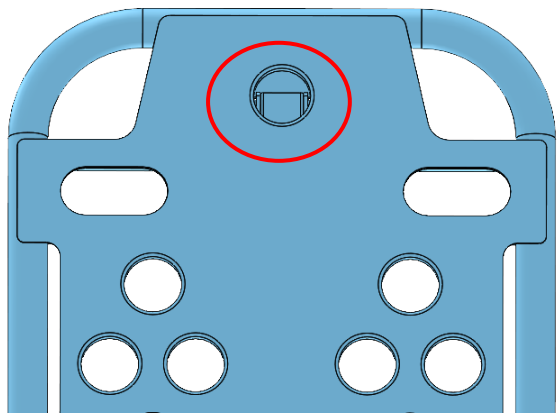
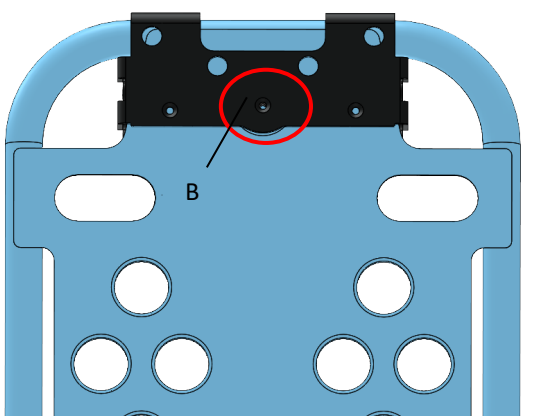
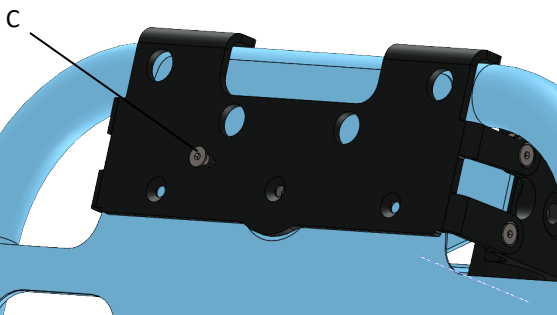
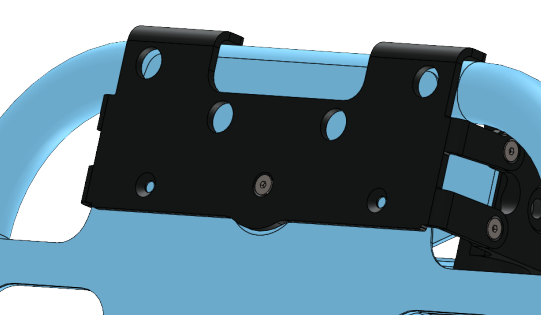
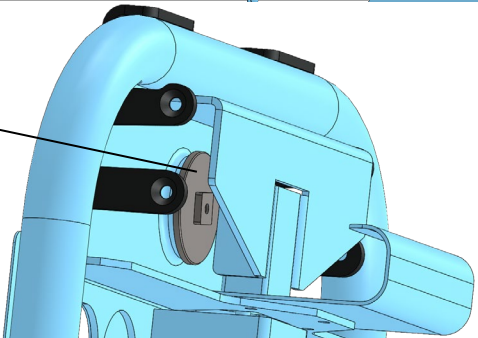
## 2 Benötigte Werkzeuge/Material

|                               |
|-------------------------------|
| Inbusschlüssel Gr. 3          |
| Maulschlüssel Gr. 8           |
| Maulschlüssel Gr. 13          |
| Schlitzschraubendreher        |
| Schraubensicherung mittelfest |

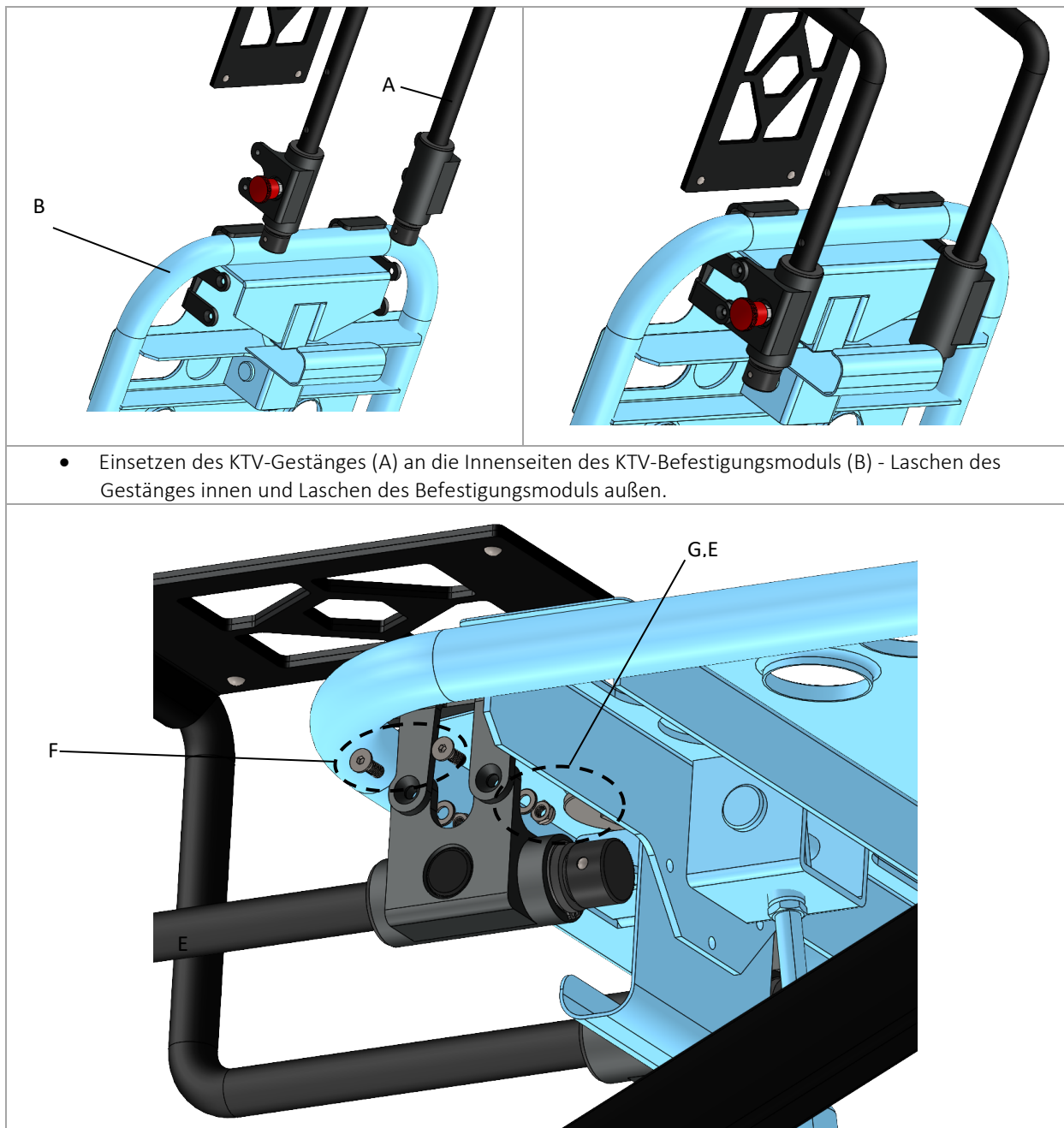


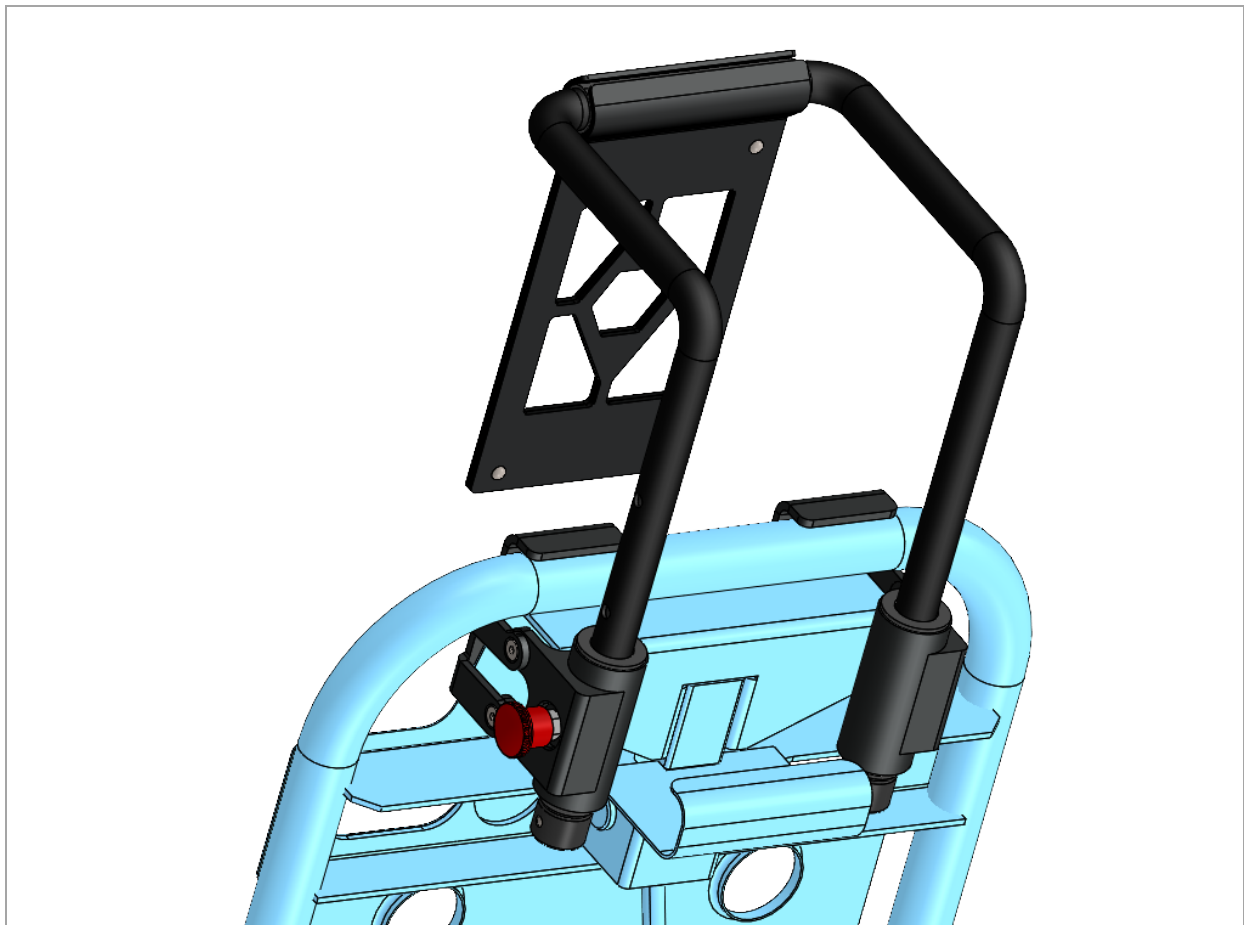
### 3 Montage

#### Montageschritt 1: Aufstecken und Befestigen des KTV-Befestigungsmoduls

|   |  |
|---|--|
|    |    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufstecken des KTV-Befestigungsmoduls (B) auf die Rückenlehne der Trage. Dabei ist darauf zu achten, dass die Bohrung des Befestigungsmoduls genau auf dem Loch der Trage (siehe rote Kreise) zu liegen kommt.</li> </ul>  |  |
|    |  |
|   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Senkkopfschraube M5 x 10 (C) mit 2 Tropfen <b>mittelfester Schraubensicherung</b> auf der Schraubenspitze einsetzen.</li> <li>• Die Gewindescheibe (D) mit angesetztem Maulschlüssel Gr. 13 von der Unterseite in die Lochvertiefung der Rückenlehne einsetzen.</li> <li>• Zum Festziehen: Inbusschlüssel für die Schraube (C) und Maulschlüssel Gr. 13 für die Gewindescheibe (D) verwenden und handfest anziehen.</li> </ul> |  |

Montageschritt 2: Montage des KTV-Gestänges am KTV-Befestigungsmodul





- Die vier Senkkopfschrauben mit Innensechskant M5 x 14 (E) von außen durch die Bohrungen in den Laschen von KTV-Befestigungsmodul und KTV-Gestänge stecken.
- Unterlegscheiben (G) auf die Senkkopfschrauben (E) aufschieben und anschließend die selbstsichernden Muttern (F) mit Maulschlüssel Gr. 8 aufschrauben.



Bei der Montage der selbstsichernden Sechskantmutter (F) ist darauf zu achten, dass der Kunststoffeinsatz (blauer Sicherungsring) nach außen zeigt.

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Artikelnummer/-n      | 11136          |
| Letzte Änderung am    | 28.02.2024     |
| Letzte Änderung durch | Stefan Fischer |
| Version des Dokuments | 1.1            |