



Montageanleitung

Set Normschiene Fußende

mit Stativ auf Unterschenkelhöhe

für Stryker Power-PRO 2

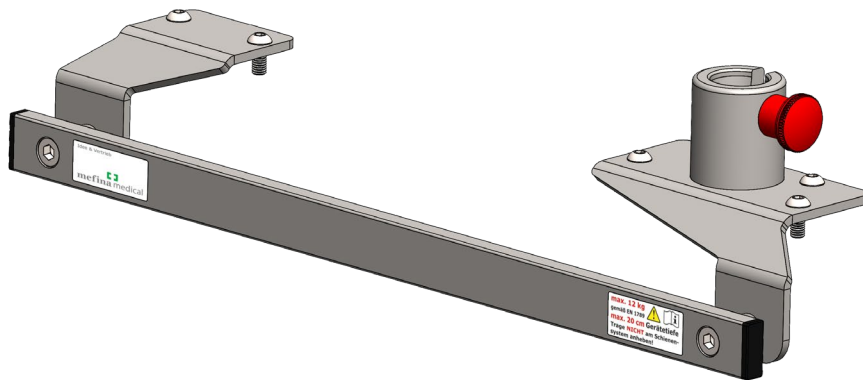

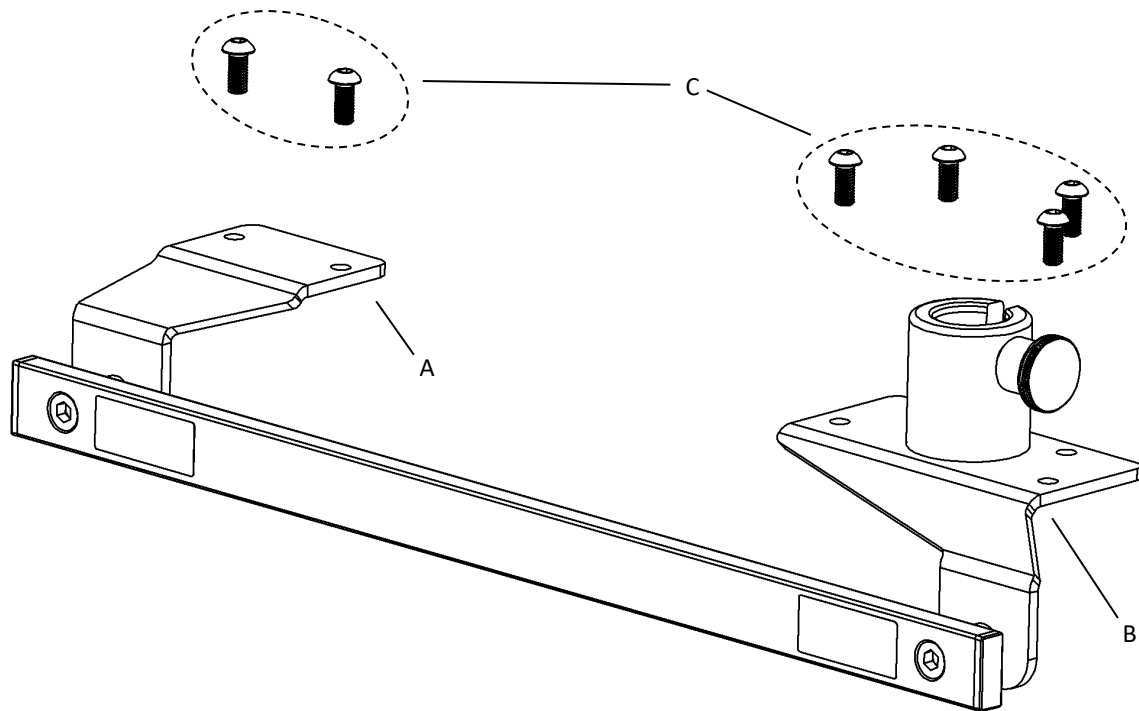

1 Lieferumfang

Bezeichnung	Artikel	Anzahl
A	Verbindungsblech klein	1
B	Verbindungsblech groß mit Stativsockel	1
C	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant M6 x 16 schwarz	6

2 Benötigte Werkzeuge/Material

Inbusschlüssel Gr. 4


Schraubensicherung mittelfest






In dieser Montageanleitung wird die Montage des Sets Normschiene Fußende auf der rechten Patientenseite der Stryker Power-PRO 2 beschrieben. Die Montage des linksseitigen Sets Normschiene Fußende erfolgt analog zu der hier beschriebenen Montage.

3 Montage

Montageschritt 1: Positionierung des Sets Normschiene Fußende an der Trage

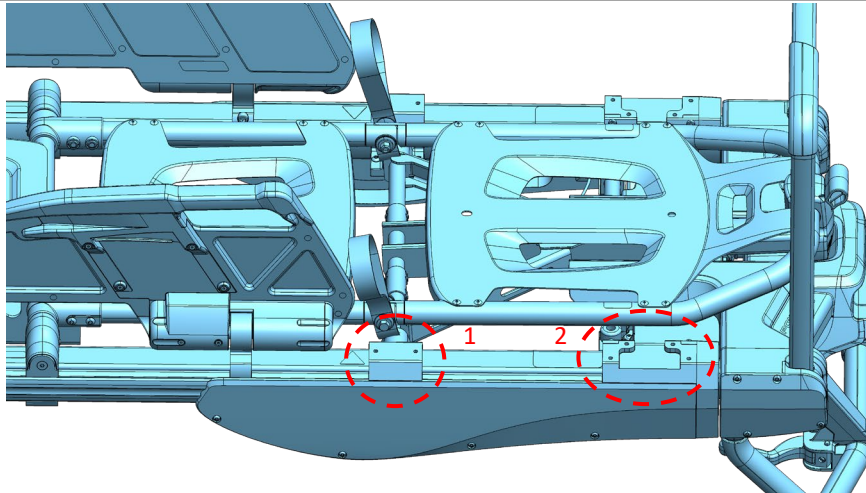


- Zur Positionierung und Montage dienen die hier rot umkreisten Platten und Bohrungen (1 & 2) auf dem Holm der Stryker Power-PRO 2.

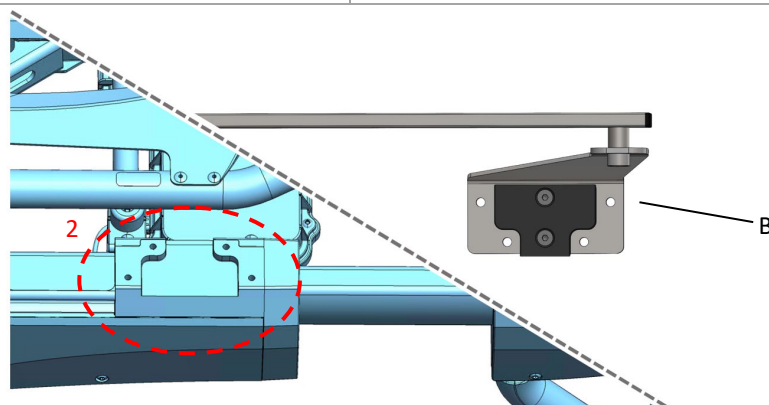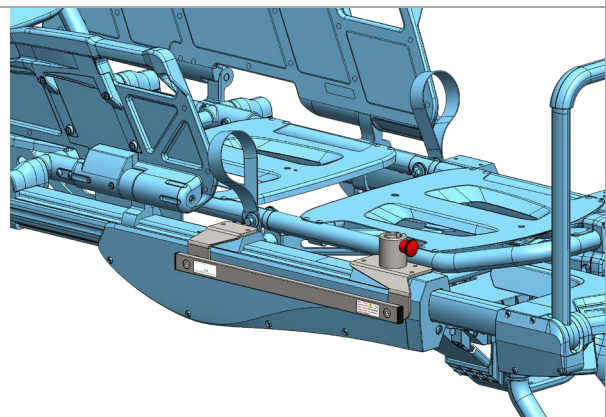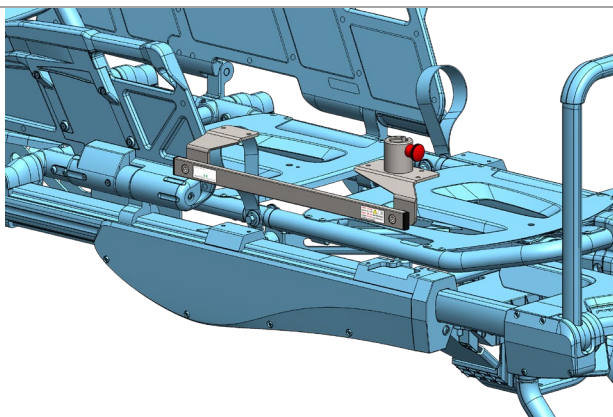


- Zur Positionierung des Sets Normschiene Fußende das große Verbindungsblechs (B) mit der darunter befindlichen Füllplatte in die Vertiefung an Position 2 auf dem Holm der Trage einlegen.

Montageschritt 2: Montage des Sets Normschiene Fußende an der Trage

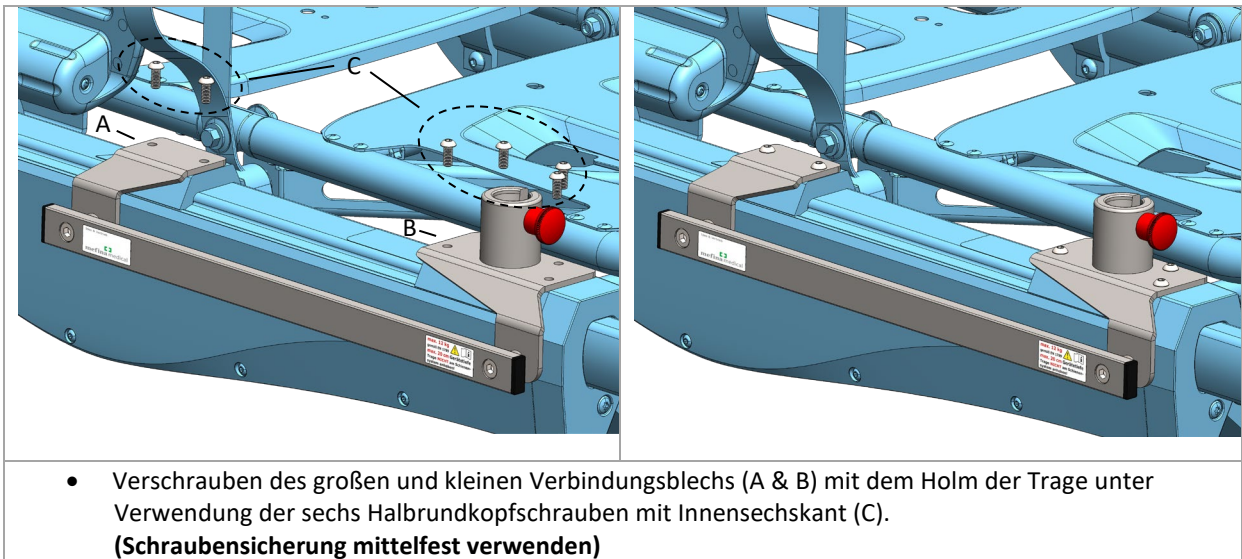

4 Finale Ansicht

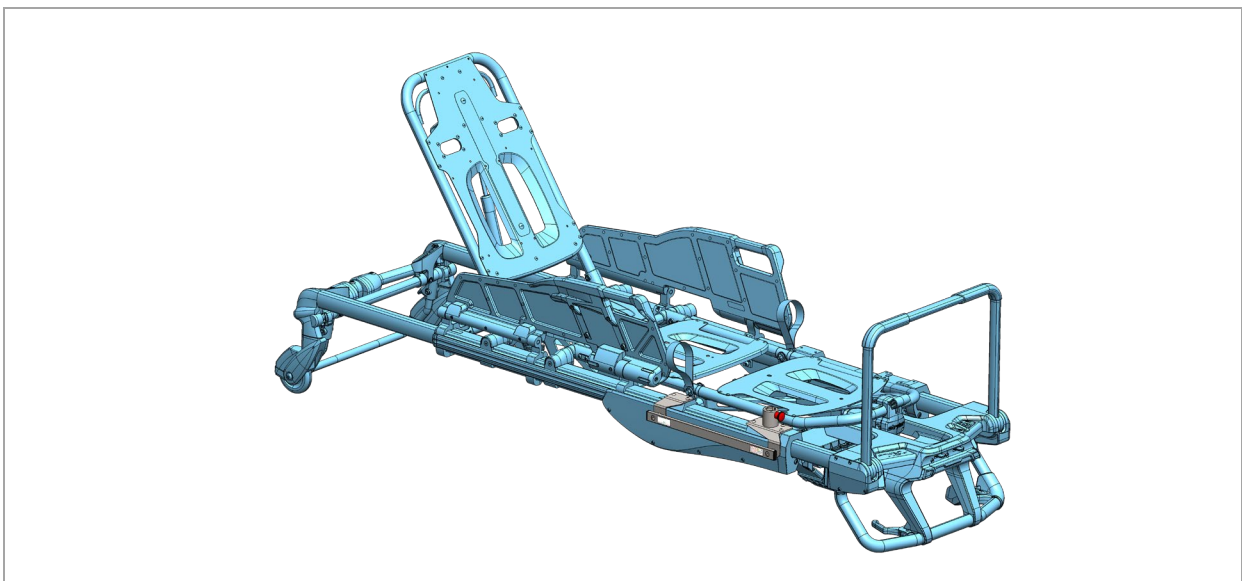

Artikelnummer/-n	15688, 15689
Letzte Änderung am	18.04.2024
Letzte Änderung durch	Stefan Fischer
Version des Dokuments	2.0