



# Montageanleitung

## Set Normschiene Fußende mit Stativ auf Kniehöhe für Stryker Power-PRO 2

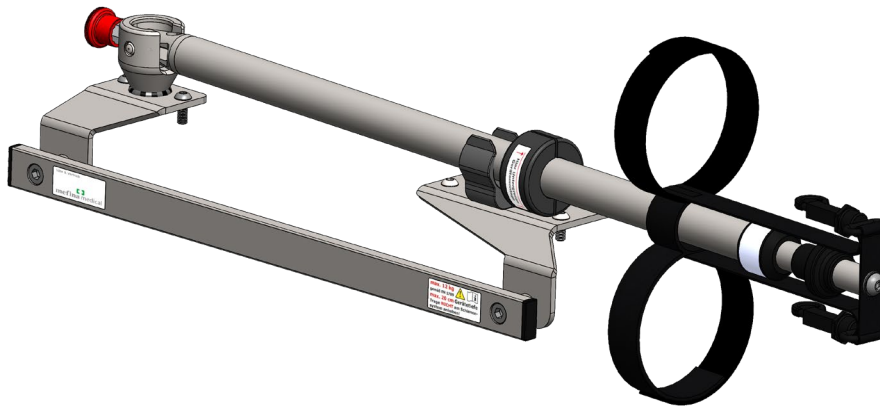

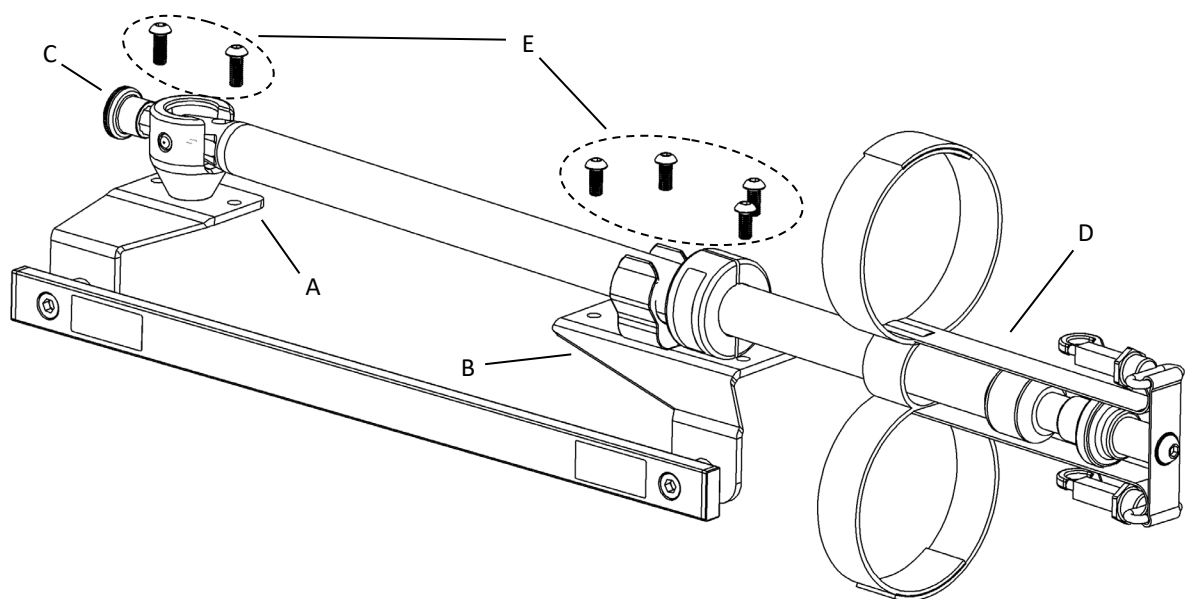

## 1 Lieferumfang

Bezeichnung	Artikel	Anzahl
A	Verbindungsblech klein	1
B	Verbindungsblech groß mit Füllplatte	1
C	Rastbolzen	1
D	Stativ	1
E	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant M6 x 16 schwarz	6

## 2 Benötigte Werkzeuge/Material

Inbusschlüssel Gr. 4
Maulschlüssel Gr. 13
Schraubensicherung mittelfest





In dieser Montageanleitung wird die Montage des Sets Normschiene Fußende auf der rechten Patientenseite der Power-PRO 2 beschrieben. Die Montage des linksseitigen Sets Normschiene Fußende erfolgt analog zu der hier beschriebenen Montage.

### 3 Montage


#### Montageschritt 1: Vorbereitung des Sets Normschiene Fußende mit Stativ

Bringen Sie das Stativ für die weitere Montage in aufrechte Position


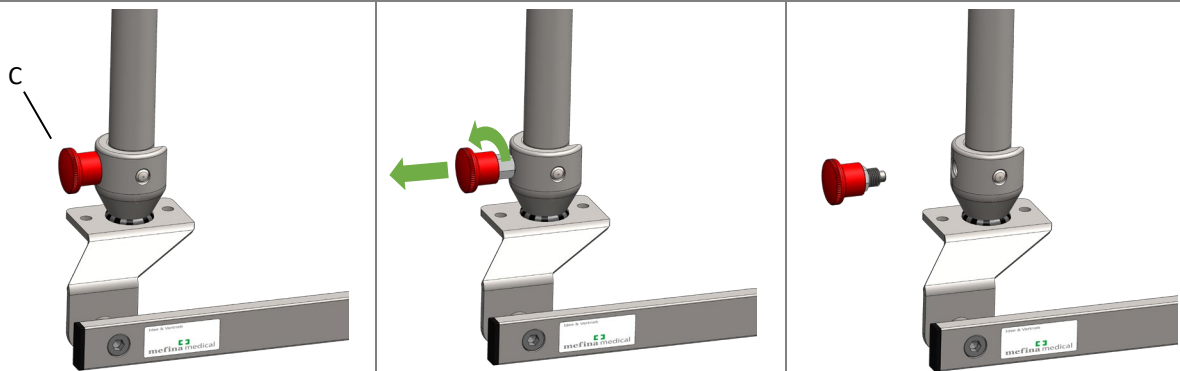
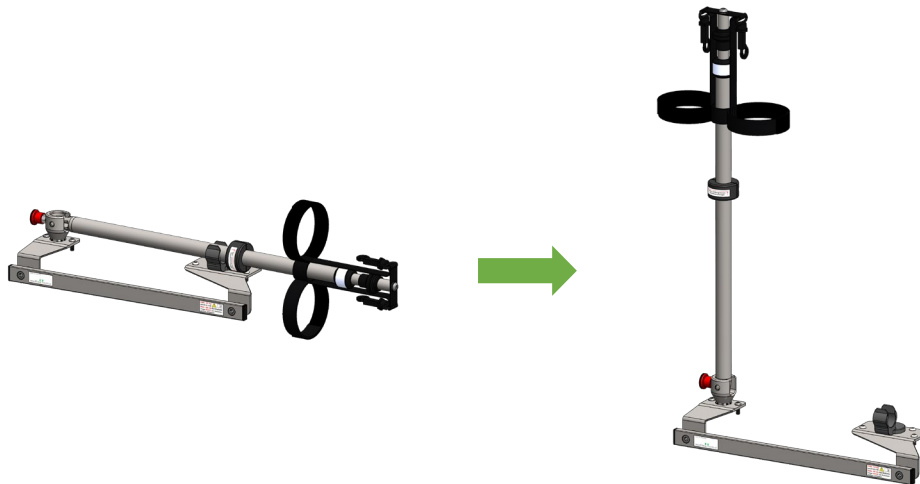


- Demontage des Rastbolzens (C) durch Ziehen desselbigen und Lösen der nun sichtbaren Sechskantfixierung mit einem Maulschlüssel Gr. 13.

## Montageschritt 2: Positionierung des Sets Normschiene Fußende an der Trage

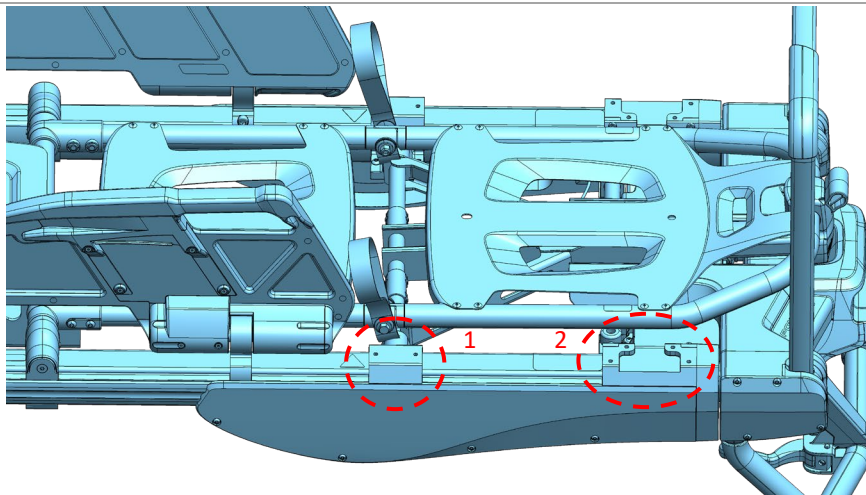


- Zur Positionierung und Montage dienen die hier rot umkreisten Platten und Bohrungen (1 & 2) auf dem Holm der Stryker Power-PRO 2.

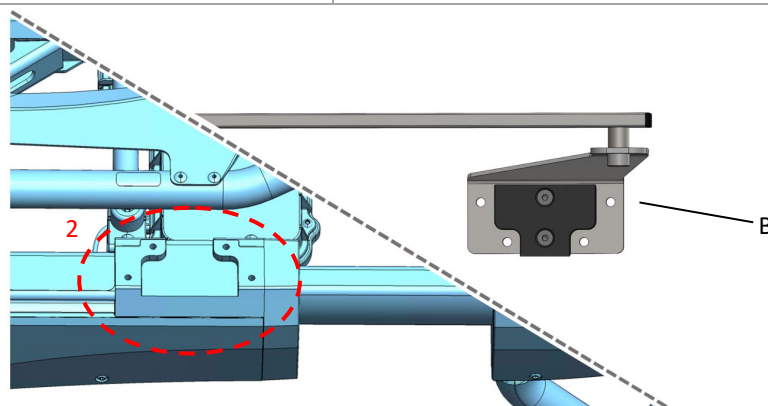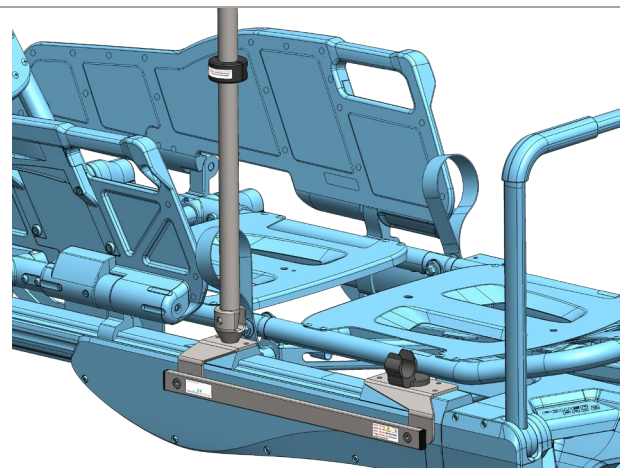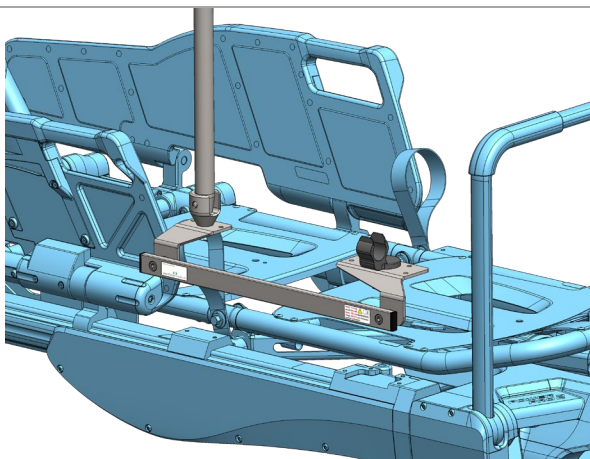


- Zur Positionierung des Sets Normschiene Fußende das große Verbindungsblech (B) mit der darunter befindlichen Füllplatte in die Vertiefung an Position 2 auf dem Holm der Trage einlegen.

### Montageschritt 3: Montage des Sets Normschiene Fußende an der Trage

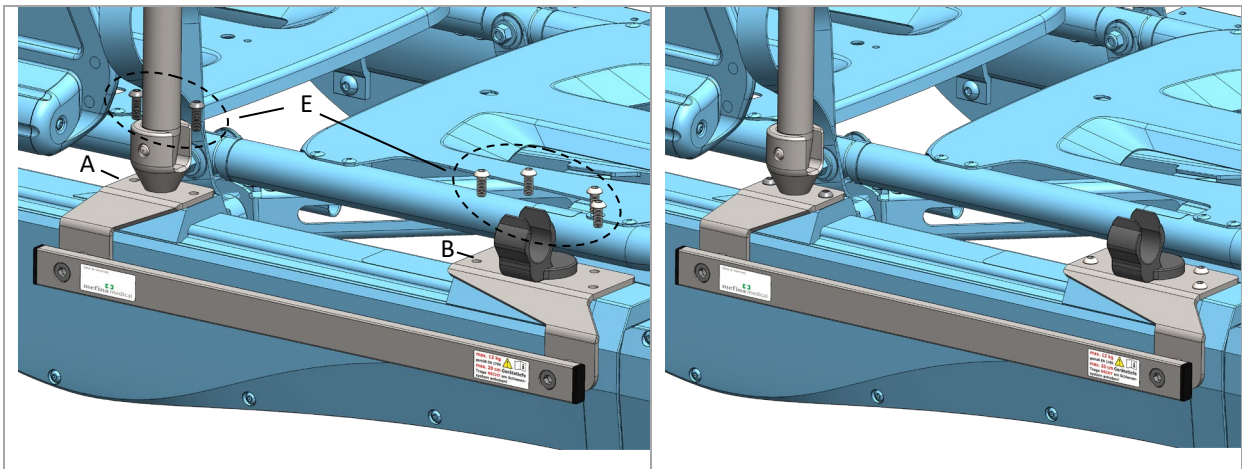


- Verschrauben des großen und kleinen Verbindungsblechs (A & B) mit dem Holm der Trage unter Verwendung der sechs Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant (E).  
**(Schraubensicherung mittelfest verwenden)**

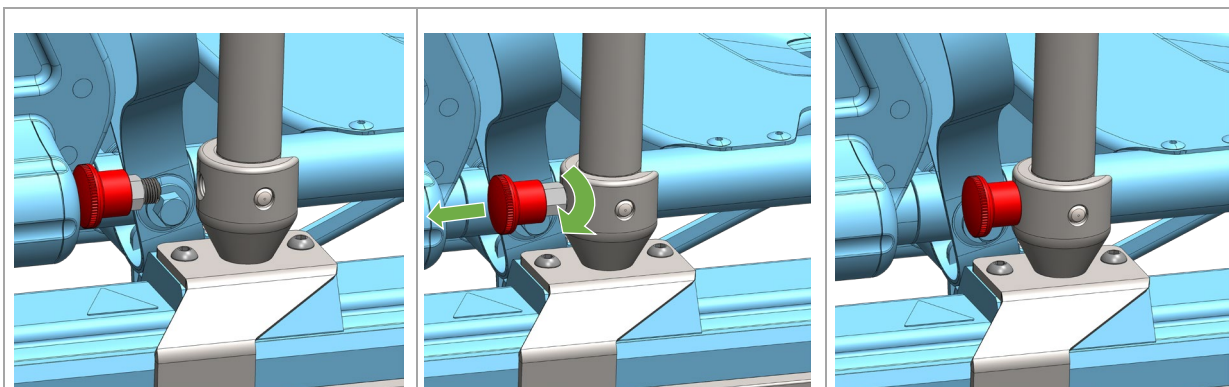

- Montage des Rastbolzens (C) durch zunächst leichtes Aufschrauben per Hand, bis das Gewinde merklich greift. Dann am Rastbolzen ziehen, bis die Sechskantfixierung sichtbar ist.
- Finales Festziehen der Sechskantfixierung mit Hilfe eines Maulschlüssels Gr. 13.

#### 4 Finale Ansicht

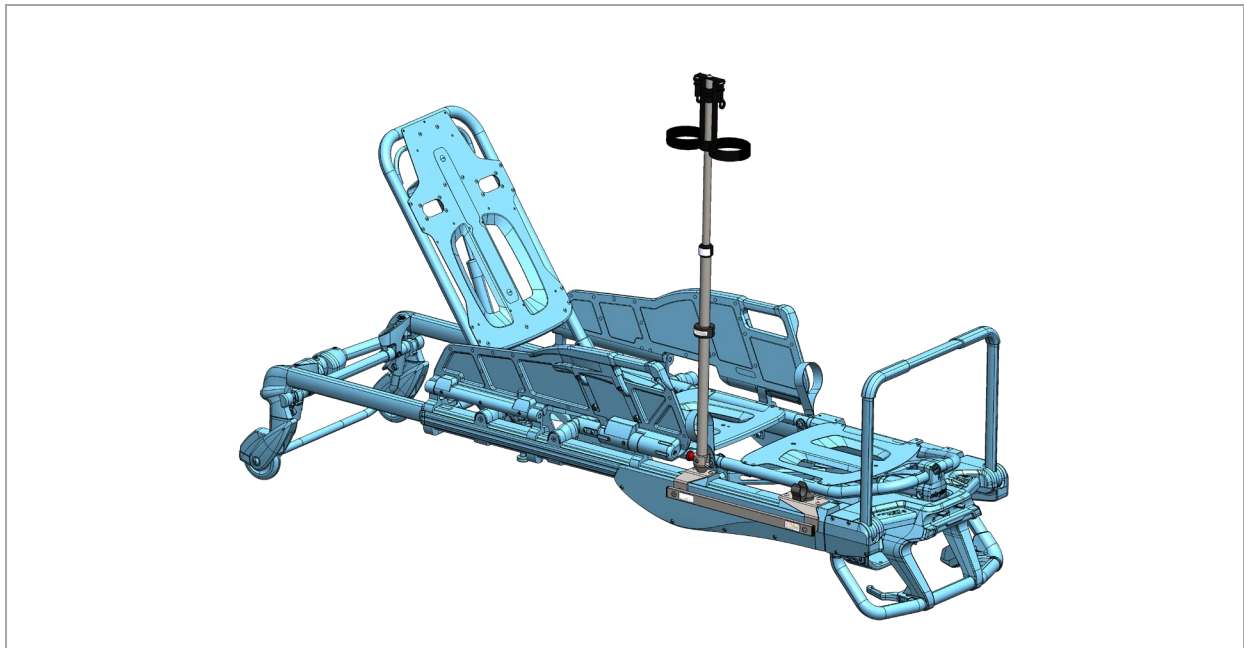

Artikelnummer/-n	15657, 15658
Letzte Änderung am	18.04.2024
Letzte Änderung durch	Stefan Fischer
Version des Dokuments	2.0