


Montageanleitung Stativ auf Fußhöhe für Stryker Power-PRO 2



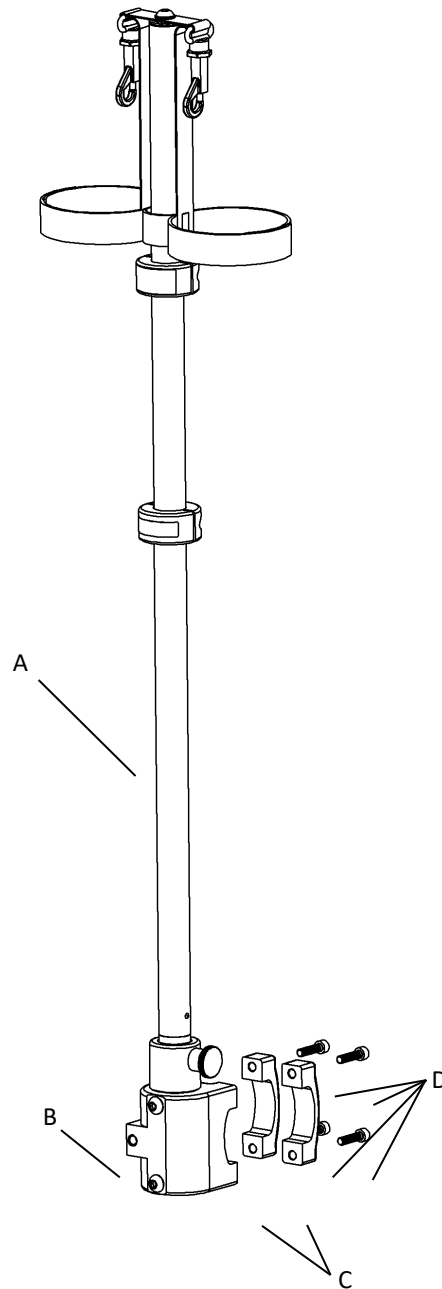


1 Lieferumfang

Bezeichnung	Artikel	Anzahl
A	Entnehmbares Stativ	1
B	Klaue für Ausziehholm	1
C	Klauenschelle	2
D	Zylinderschraube mit Innensechskant M6 x 25	4

2 Benötigte Werkzeuge/Material

Inbus Gr. 4

Schraubensicherung mittelfest



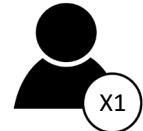


In dieser Montageanleitung wird die rechtsseitige Montage Stativs auf Fußhöhe an der Stryker PowerPro 2 beschrieben. Die linksseitige Montage erfolgt analog zu der hier beschriebenen Montage.

3 Montage


Montageschritt 1: Demontage von Klaue und Klauenschellen

Vor Beginn das Stativ aus dem Stativhalter entfernen.

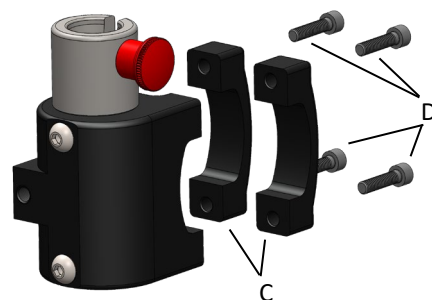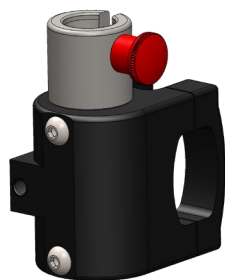
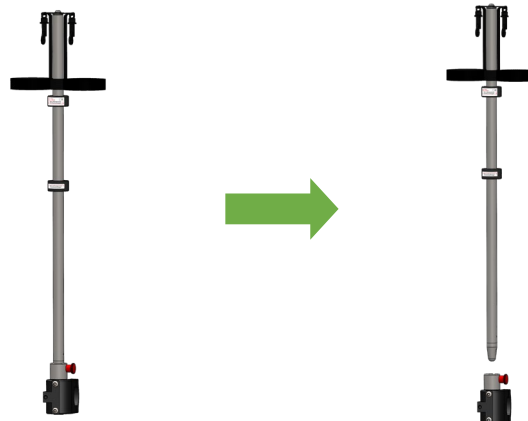


- Lösen der vier Zylinderschrauben mit Innensechskant (D).
- Entfernen der zwei Klauenschellen (C).

Montageschritt 2: Positionierung und Montage der Klaue mit Stativhalter an der Trage

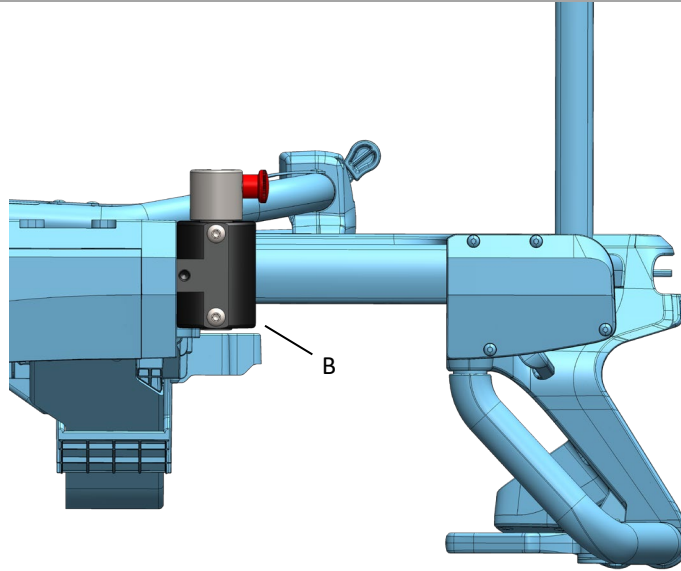


- Den Holm am Fußende der Trage komplett ausziehen.
- Die Klauen (B) an der Außenseite des Holms, wie oben dargestellt, anlegen.

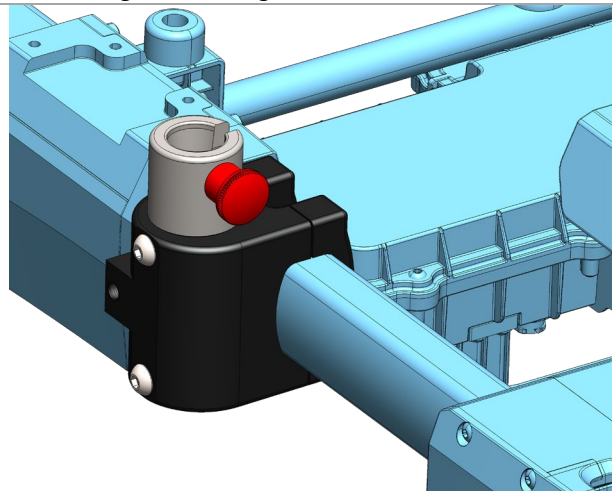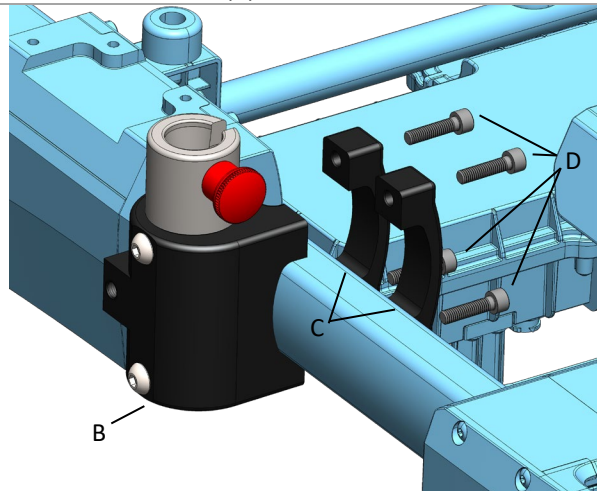


- Die Zwei Klauenschellen (C) mit den vier Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant (D), von der Innenseite des Holms, mit der Klaue (B) verschrauben.
(Schraubensicherung mittelfest verwenden)

Montageschritt 3: Montage des entnehmbaren Stativs

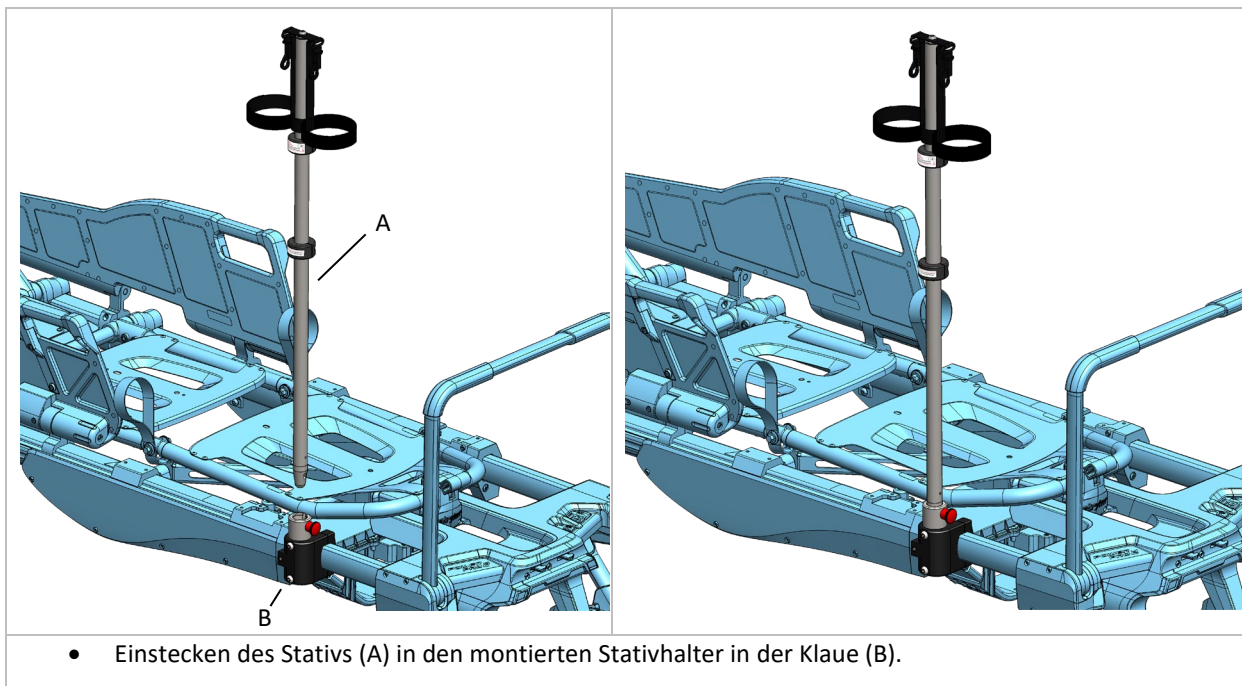

4 Finale Ansicht

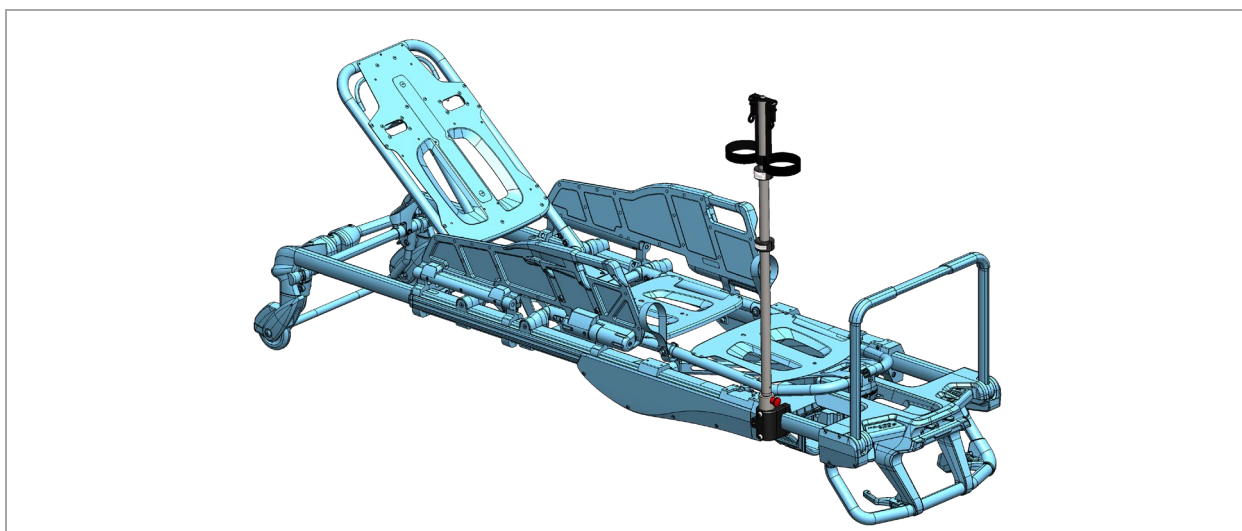

Artikelnummer/-n	16388, 16389
Letzte Änderung am	15.01.2024
Letzte Änderung durch	Stefan Fischer
Version des Dokuments	1.0