


Montageanleitung

Halter für C3-Patientenbox an Stollenwerk-
CPS-Kopfteilverlängerung (KTV)



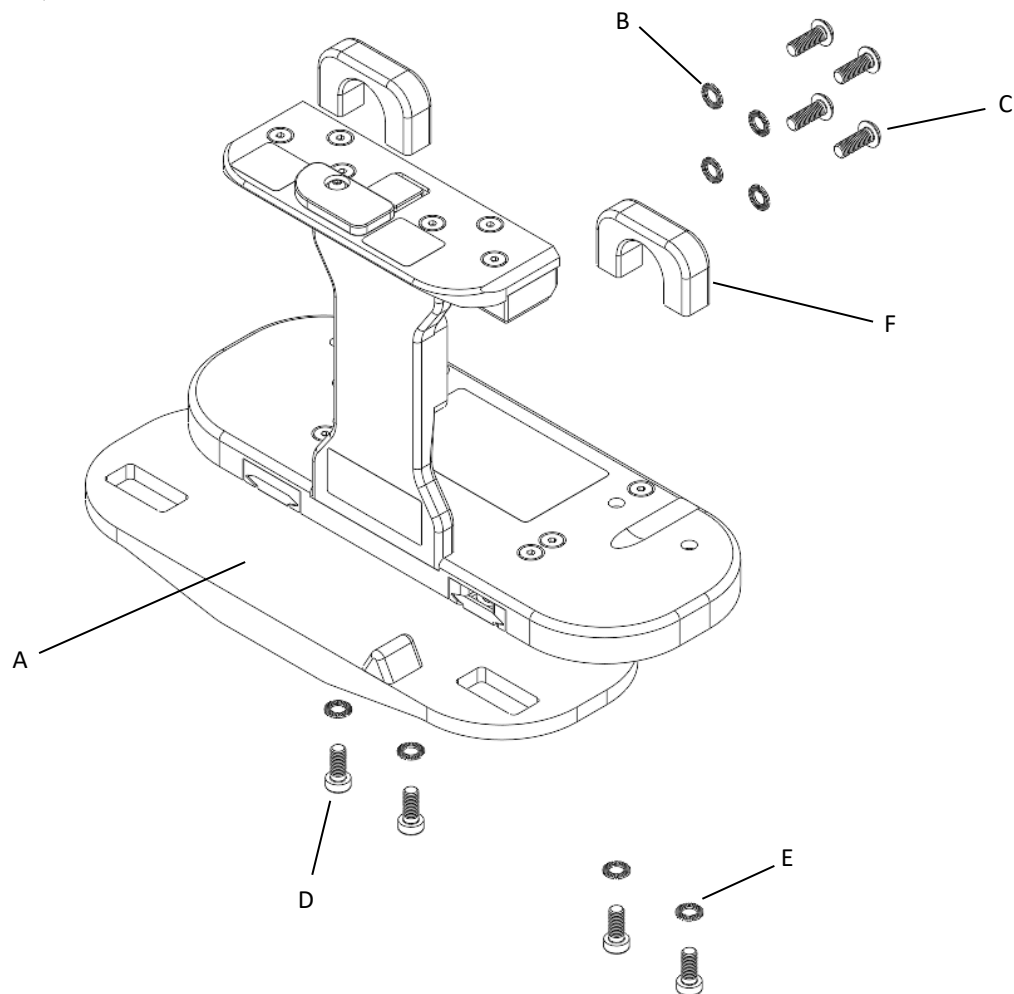

1 Lieferumfang


Bezeichnung	Artikel	Anzahl
A	Halterung für C3-Patientenbox	1
B	Sicherungsscheiben Ø 5,3mm	4
C	Halbrundkopfschraube mit Innensechskant M5 x 14	4
D	Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant M4 x 12	4
E	Sicherungsscheiben Ø 4,3mm	4
F	Schellen	2

2 Benötigte Werkzeuge/Material

Inbus Gr. 3	
Inbus Gr. 4	
Schraubensicherung mittelfest	


3 Montage

Vor der Montage die Kopfteilverlängerung aus der Fahrtrage CPS zur einfacheren Handhabung entnommen und auf einer Arbeitsfläche platziert werden.

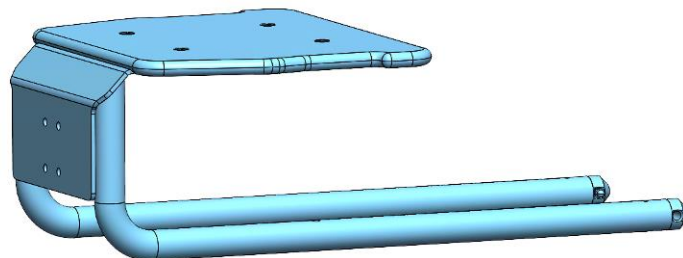


Halterung vorbereiten:

- Herausdrehen der vier Linsenkopfschrauben (C) und Sicherungsscheiben (B).
- Rote Bodenplatte herausziehen.
- Vier Zylinderkopfschrauben (D) mit Sicherungsscheiben (E) aus den beiden Schellen (F) herausdrehen.

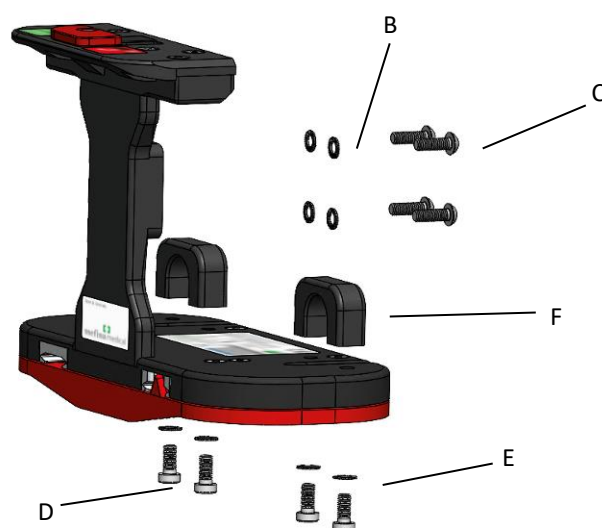


Halterung montieren:


- Halterung mit der Kopfteilverlängerung, wie im Bild dargestellt, auf einen Tisch stellen.
- Die Halterung mit den vier Linsenkopfschrauben (C) und den Sicherungsscheiben (B) mit Verwendung von je 2 Tropfen mittelfester Schraubensicherung an der Kopfteilverlängerung locker verschrauben, so dass die Position noch korrigiert werden kann.

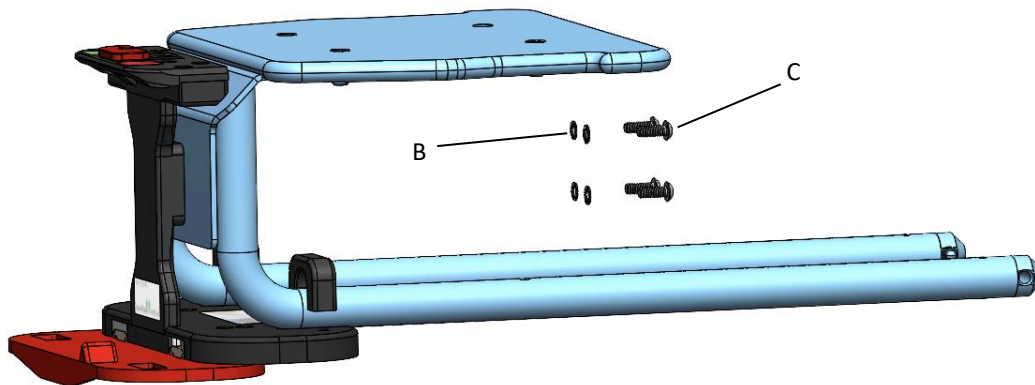

- Mit den vier Zylinderschrauben (D) und den Sicherungsscheiben (E) die Klemmschellen (F) mit Verwendung von je 2 Tropfen mittelfester Schraubensicherung am Gestänge der KTV locker verschrauben.

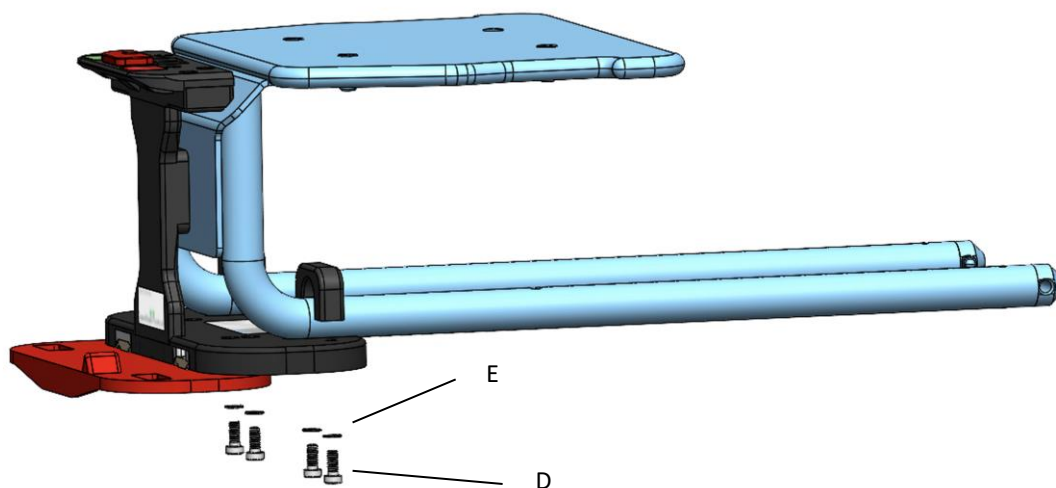

Zuletzt alle Schrauben handfest anziehen und anschließend die Kopfteilverlängerung mit montierter Halterung wieder in die Fahrtrage CPS einsetzen.

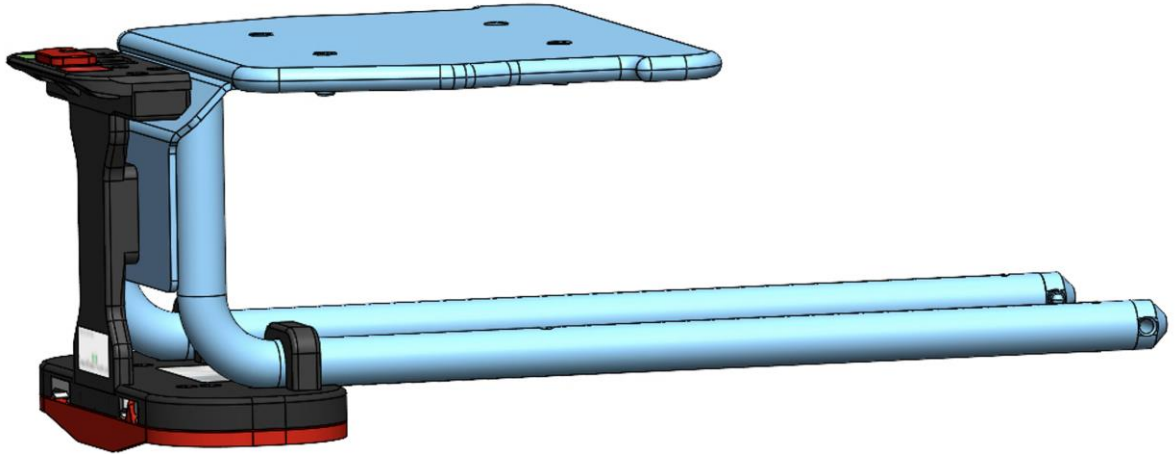

Artikelnummer/-n	120389
Letzte Änderung am	14.07.2025