


Montageanleitung

Halter für C3-Patientenbox an Stryker-Kopfteilverlängerung (KTV)



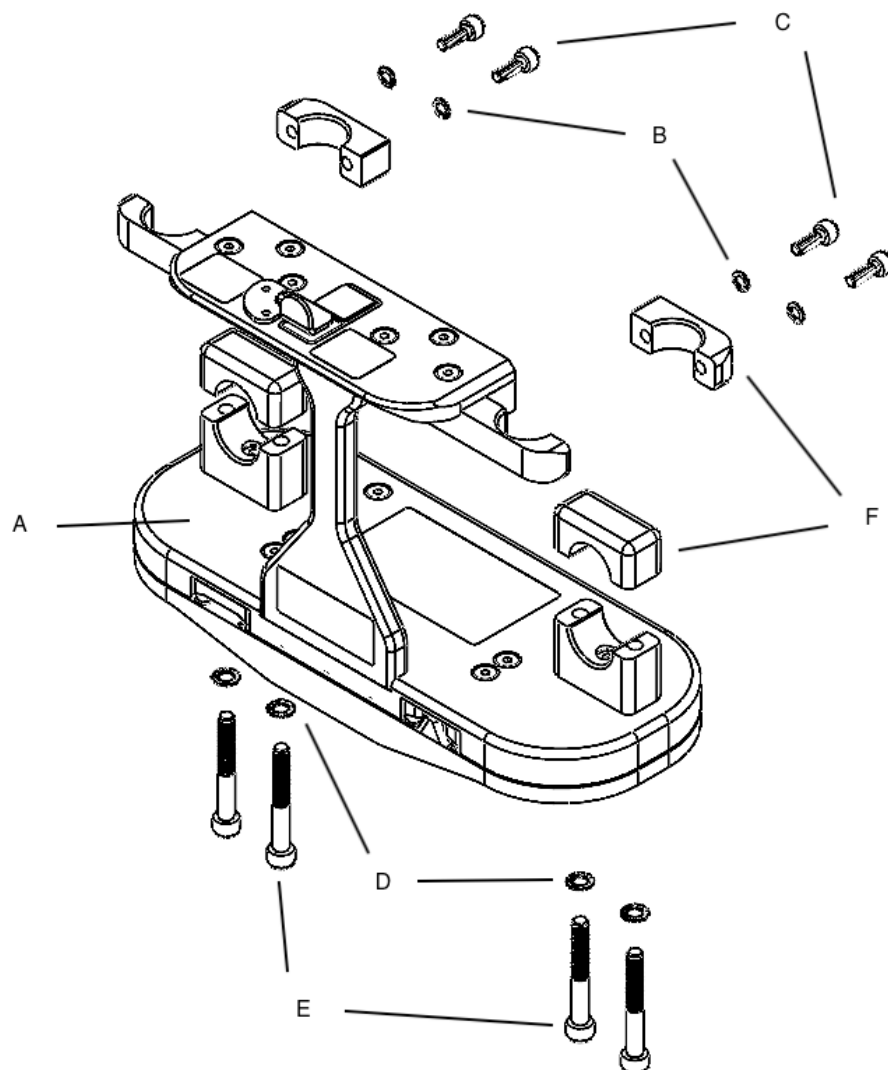

1 Lieferumfang

Bezeichnung	Artikel	Anzahl
A	Halterung für C3-Patientenbox	1
B	Sicherungsscheiben $\varnothing$ 4,3 mm	4
C	Zylinderschraube mit Innensechskant M4 x 12	4
D	Sicherungsscheiben $\varnothing$ 5,3 mm	4
E	Zylinderschrauben mit Innensechskant M5 x 40	4
F	Schellen	4

2 Benötigte Werkzeuge/Material

Inbus Gr. 3	
Inbus Gr. 4	
Schraubensicherung mittelfest	

3 Montage


Halterung vorbereiten:

- Herausdrehen der oberen vier Zylinderkopfschrauben (C) und Sicherungsscheiben (B).
- Rote Bodenplatte herausziehen.
- Herausdrehen der unteren vier Zylinderkopfschrauben (E) und Sicherungsscheiben (D).




Halterung montieren:

- Die Halterung und die beiden unteren Schellen (F) mit den vier unteren Schrauben (E) und den Sicherungsscheiben (D) mit Verwendung von je 2 Tropfen mittelfester Schraubensicherung am Gestänge der Kopfteilverlängerung locker verschrauben, so dass die Position noch korrigiert werden kann.
- Die beiden oberen Schellen (F) mit den vier oberen Schrauben (C) und den Sicherungsscheiben (B) mit Verwendung von je 2 Tropfen mittelfester Schraubensicherung ebenfalls am Gestänge der KTV locker verschrauben.

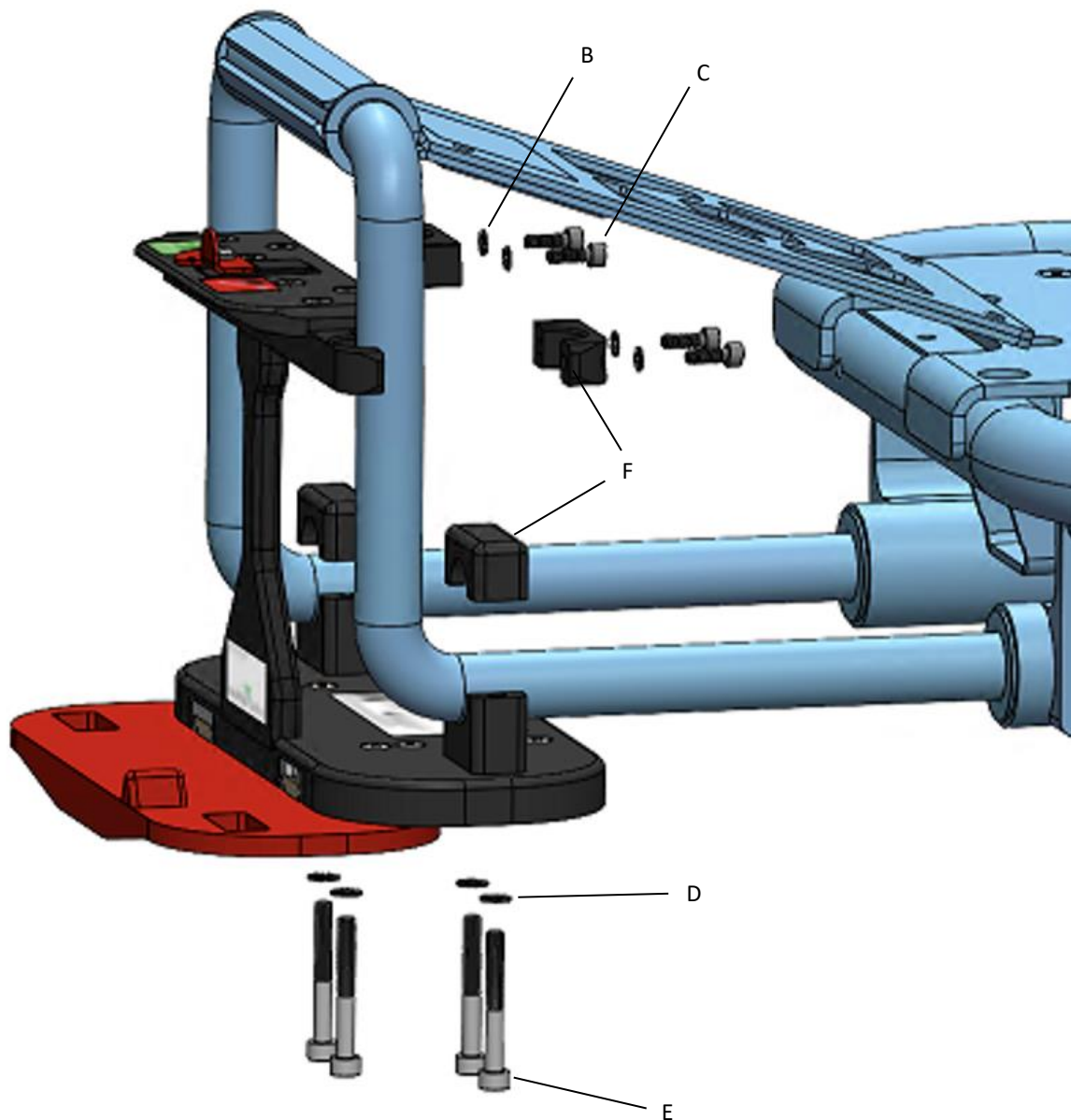

Zuletzt alle Schrauben handfest anziehen.

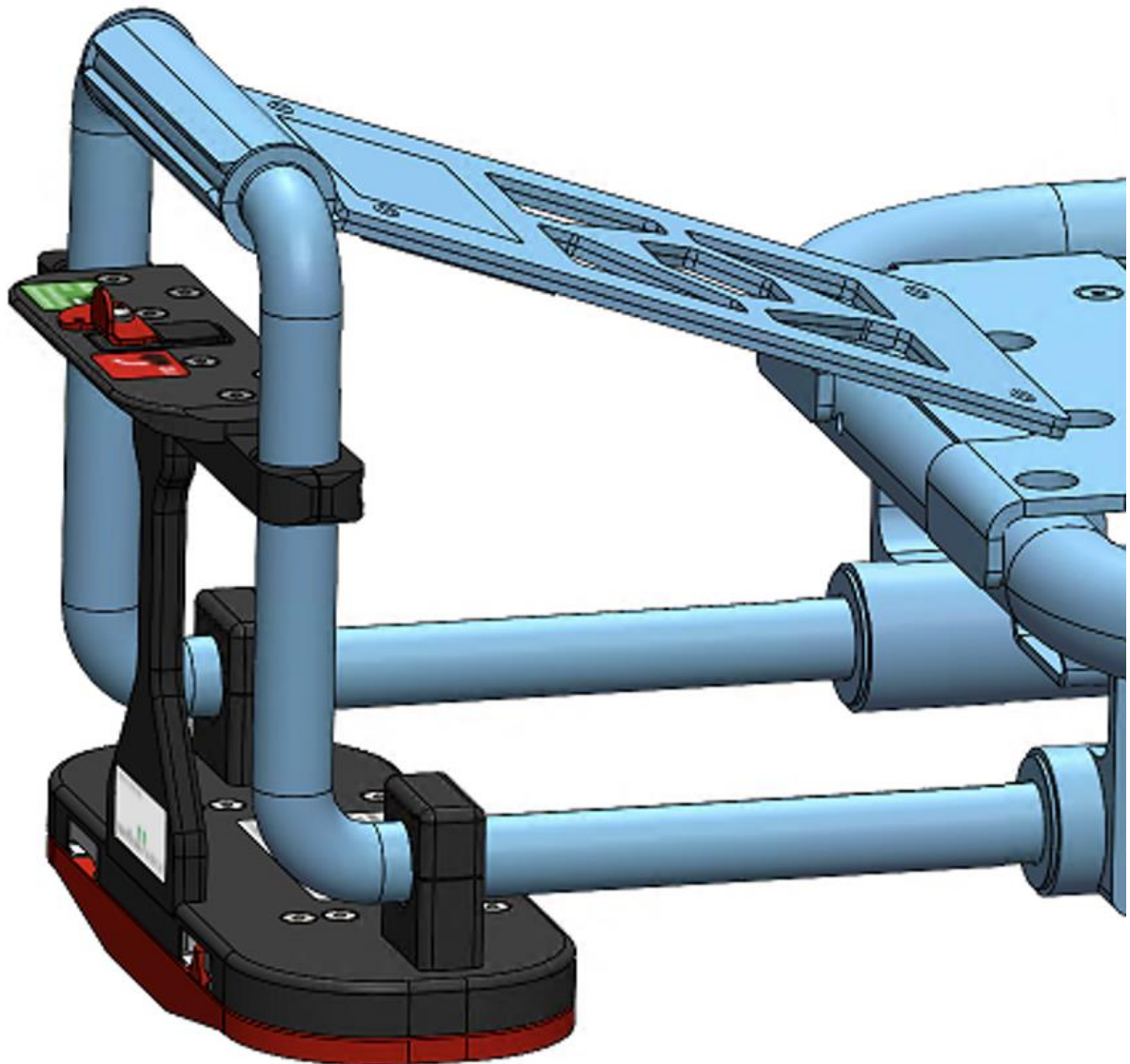

Artikelnummer/-n	14702
Letzte Änderung am	14.07.2025