


Montageanleitung

Distanzhalter für Stryker M1 Fahrtrage

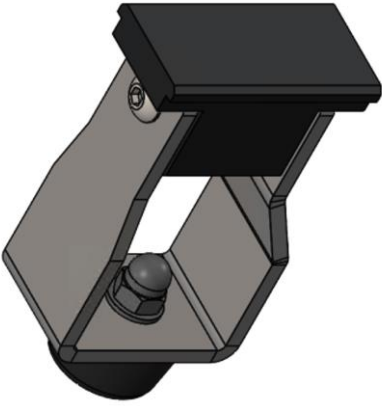

1 Lieferumfang

Abbildung	Artikel	Anzahl	Artikelnummer
	Distanzhalter für Stryker M1	1	11341

2 Werkzeuge & Material für Montage

Kreuzschlitz-Schraubendreher
Schraubensicherung, mittelfest

3 Montage

	Es müssen immer zwei Distanzhalter jeweils rechts und links an der Rückenlehen der Fahrtrage montiert werden!
---	---

3.1 Demontage des Montageklotzes


Die seitlichen Schrauben herausdrehen und den Montageklotz entnehmen.

3.2 Montageklotz an der Rückenlehne einsetzen



- Den Montageklotz an der dargestellten Position in der gezeigten Ausrichtung einschieben.

3.3 Verschraubung des Distanzhalters am Montageklotz



- Den Distanzhalter in korrekter Ausrichtung (gewinkelte Seite zeigt zum Fußende) von unten über den Montageklotz schieben.
- Den Distanzhalter mit den beiden Schrauben seitlich verschrauben. Dabei jeweils 2 Tropfen mittelfeste Schraubensicherung verwenden.

Letzte Änderung	27.01.2026
Version	1.0